

 REGIONE DEL VENETO ULSS5 POLESANA UOC Medicina di Laboratorio	CATALOGO PRESTAZIONI UOC MEDICINA DI LABORATORIO (CPL)	DV/MLAB/09 Rev. 7 Pag. 1/38
---	---	-----------------------------------

Redatto	Approvato
Flora Formenton Alessandro Camerotto Sabina Magagna	Alessandro Camerotto

Aggiornato 07.01.2025

Gentile utente, operatore,
 questo catalogo descrive l'offerta di tutte le prestazioni della UOC Medicina di Laboratorio e le prestazioni più comuni per utenti esterni delle UO Anatomia Patologica e Medicina Trasmfusionale, accettabili presso i Centri Prelievi e le UO Ospedaliere.

Troverà gli esami in ordine alfabetico o, in alternativa, selezionandoli dalla barra superiore del menù cliccando su **Trova**. Si aprirà una finestra dove inserire il nome del test o il codice del Catalogo Veneto del Prescrivibile (CVP) versione 2.4. Premendo **Invio** il cursore si posizionerà su tutte le voci con il nome indicato.

Il Catalogo è suddiviso in colonne:

nella colonna **Denominazione del test/Prestazione** è specificato il nome del test e l'eventuale sigla corrispondente. Gli esami evidenziati in **rosso** e grassetto sono richiedibili anche/come urgenti da Pronto Soccorso e UO Ospedaliere.

Nella colonna **Codice regionale (CVP) e codice CUP/WEB Insiel** è indicato il codice LEA attribuito al test dalla Regione Veneto nel CVP e, in carattere rosso, il codice utilizzabile in fase di accettazione dall'operatore del Centro Prelievi e UO ospedaliera. I codici regionali di questo catalogo sono quelli in uso nella ULSS 5.

Nella colonna **Metodo/tecnologia/strumento e Precisione** è indicato il metodo/tecnologia con cui vengono eseguiti i test eseguiti nella UOC Medicina di Laboratorio. La Precisione è espressa come coefficiente di variazione (CV%): $DS/media \times 100$. E' un indice di incertezza, indicata in diversi test, ottenuto su almeno su 2 livelli di dosaggio.

Nelle colonne **Matrice/provetta/note** è indicata la matrice (siero, plasma, urine, etc.) su cui viene eseguito il test, il colore del tappo della provetta o il contenitore, l'eventuale anticoagulante e particolari modalità di raccolta e conservazione del campione.

Nella colonna **Tempo di refertazione** è indicato il tempo massimo di attesa del referto utenti esterni espresso come primo giorno lavorativo utile dal venerdì al sabato, escluso il giorno del prelievo. Di norma, comunque, l'80 % degli esami è disponibile entro le ore 16 del giorno del prelievo. I primi esami interni di routine sono visualizzabili nei terminali dei reparti dalle ore 10.00.

Gli esami richiedibili come urgenti (PS e UO) sono visualizzabili nei terminali entro 1 ora dall'arrivo del campione in Laboratorio

Gli esami di utenti esterni richiesti "in giornata" sono in rete entro le ore 14.00 del giorno del prelievo.

Nella colonna **Sede esecuzione al di fuori del Laboratorio ULSS 5** è indicata la sede di esecuzione degli esami in service: test che, per scarsa numerosità o impossibilità tecnica di esecuzione, sono inviati a strutture pubbliche venete. Questi esami, inseriti nel Catalogo e accettabili informaticamente, sono completamente gestiti dal Laboratorio.

Nella colonna **Indicazioni per operatori Centri Prelievi e Fase Preanalitica** sono indicate peculiarità tecniche specifiche per Operatori dei Centri Prelievi e Tecnici di Laboratorio.

 REGIONE DEL VENETO ULSS5 POLESANA UOC Medicina di Laboratorio	CATALOGO PRESTAZIONI UOC MEDICINA DI LABORATORIO (CPL)	DV/MLAB/09 Rev. 7 Pag. 2/38
--	---	-----------------------------------

Nota: gli esami rari/ultraspecialistici, per pazienti interni (ricoverati, PS, DH) non presenti in questo Catalogo, sono richiesti direttamente dall'UO a laboratori pubblici veneti extra azienda, senza accettazione informatica, utilizzando il modulo di richiesta MOD/MLAB/15.

Il modulo è utile al laboratorio extraaziendale ricevente per dati anagrafici, quesito diagnostico, UO e medico richiedente. Le modalità di prelievo, centrifugazione, conservazione e risposta sono concordate direttamente dall'UO richiedente con il laboratorio extraaziendale. Qualora necessario il Laboratorio è disponibile a centrifugare la provetta, restituendola all'UO richiedente che rimane responsabile della conservazione e dell'invio.

Il Laboratorio mette a disposizione il punto di raccolta centralizzato di campioni e richieste prima del ritiro degli stessi da parte dell'autista aziendale.

Per informazioni relative all'unità di misura e intervalli di riferimento si rimanda al referto.

Per informazioni relative alla tariffa si rimanda al CVP.

Per informazioni su rilevanza clinica/scopo dell'esame si rimanda a www.labtestsonline.it

N.B. Bambini con età <6 anni: prelievi eseguiti esclusivamente nei Centri Prelievi Ospedalieri.

Denominazione del test Prestazione	Codice Regionale (CVP) e Codice Cup WEB Insiel	Metodo/ tecnologia/strumento e Precisione	Matrice/ provetta/note	Tempo di refertazione	Sede esecuzione al di fuori del Laboratorio ULSS 5	Indicazioni per operatori Centri Prelievi e Fase Preanalitica: vedi specifiche terminologiche a fine tabella.
Prelievo di sangue arterioso	91.48.5_1					
Prelievo di sangue venoso.	91.49.2_1 pv		Sono eseguiti i prelievi anche per prestazioni di Microbiologia e Medicina TrASFusionale.			
Prelievo microbiologico: tamponi faringeo, linguale, cutanei, da ferita/ulcera, uretrali, balano-prepuziali, auricolari, nasali, oculari, anali e perianali, periungueale. Esame colturale ungueale per ricerca miceti.	91.49.3_1 pm		Fase analitica e refertazione eseguite da UOSD Microbiologia			
Acidi biliari (Sali biliari).	90.01.5_0 7341		Siero, blu elettrico.	10	Padova	Sierare e conservare 7 giorni a 2-8 °C.
Acido citrico (Citrato).	90.02.2_3 7208		Urina 24 ore, contenitore con 10 mL di HCL acquisibile presso Centri Prelievi ospedalieri . Evitare da due giorni precedenti e per tutto il tempo della raccolta assunzione di agrumi e Vit. C. Mantenere refrigerato durante la raccolta	17	Mestre	Conservare a 2-8 °C.
Acido Delta Aminolevulinico (ALA). E' eseguito in automatico (senza richiederlo) anche il test Porfobilinogeno 90.37.2_0 7389	90.02.3_0 7396		Urina 24 ore, contenitore senza conservanti. Acquisibile presso farmacie. Tenere al buio e refrigerato proteggendo con carta stagnola.	20	Padova Tossicologia Industriale	Conservare a 2-8 °C (proteggere con carta stagnola).

 REGIONE DEL VENETO ULSS5 POLESANA UOC Medicina di Laboratorio	CATALOGO PRESTAZIONI UOC MEDICINA DI LABORATORIO (CPL)	DV/MLAB/09 Rev. 7 Pag. 3/38
--	---	--

Acido 5 idrossi 3 indolacetico. (5-HIAA)	90.02.1_0 7200		Urina 24 ore, contenitore con HCl 10 mL ritirabile presso i centri prelievi ospedalieri. Dieta: A partire dai 2 giorni precedenti la raccolta delle urine e durante la stessa, evitare di mangiare banane, prugne, caffè, the, cioccolato, kiwi, ananas, avocado, noci, nicotina, verdure.	27	Mestre	Conservare a 2-8 °C.
Acido lattico (lattato). Eseguibile solo presso UO e Centri Prelievi Ospedalieri Acido lattico su liquor: vedi Liquor chimico fisico	90.02.5_2 275	Colorimetrico/lattato piruvato. Cobas 502 Roche. CV%: 1.2	Plasma, grigio Fluoruro di sodio + K3 EDTA. Le provette sono fornite alle UO dal Laboratorio (tel.3354) a fronte di un prelievo per specifico paziente.	1		Sierare entro 15 minuti dal prelievo. Conservare a 2-8 °C
Acido micofenolico Eseguibile solo presso UO e Centri Prelievi Ospedalieri.	90.17.B_29 new7405		Plasma, Lilla K2 EDTA,	9	Padova	Sierare entro 2 ore dal prelievo. Il plasma è stabile: 8 ore a temperatura ambiente, 14 giorni a 2-8 C°, 18 mesi a - 20C°.
Acido omovanillico. LEA solo per residenti Regione Veneto. Per Utenti extra Veneto accettare come Privati Paganti.	90.38.G_2 7212		Urina 24 ore, contenitore con HCl 20mL. ritirabile presso i centri prelievi ospedalieri. Nelle 12 ore precedenti la raccolta evitare esercizio fisico intenso, fumo, pasto iperproteico e caffeina, alcolici, banana, cacao, agrumi, ananas, vaniglia, noci	28	Mestre	Conservare a 2-8 °C.
Acido vanilmandelico (VMA)	90.03.6_3 new448		Urina 24 ore, contenitore con HCL 10 mL ritirabile presso i centri prelievo ospedalieri. Nelle 12 ore precedenti raccolta evitare esercizio fisico intenso, fumo, pasto iperproteico e caffeina, alcolici, banana, cacao, agrumi, ananas, vaniglia, noci.	28	Mestre	Conservare a 2-8 °C.
Acido Valproico (Valproato)	90.17.C_2 new1231	Immunoenzimatico G6PDH Cobas 502 Roche. CV%: 3.6	Plasma, verde chiaro litio eparina. Plasma, verde scuro litio eparina urgenze	1		
Adrenalina Noradrenalina (Catecolamine).	90.03.6_6 90.03.6_7		Urina 24 ore, contenitore con	28	Mestre	Conservare a 2-8 °C.

 REGIONE DEL VENETO ULSS5 POLESANA UOC Medicina di Laboratorio	CATALOGO PRESTAZIONI UOC MEDICINA DI LABORATORIO (CPL)	DV/MLAB/09 Rev. 7 Pag. 4/38
--	--	--

	new7510		conservante HCL 10mL. Ritirabile presso i centri prelievi ospedalieri. Mantenere in luogo fresco durante la raccolta. Nelle 12 ore precedenti la raccolta evitare esercizio fisico intenso, fumo, pasto iperproteico e caffeina, alcolici, banana, cacao, agrumi, ananas, vaniglia, noci.			
Alanina aminotransferasi (ALT, GPT)	90.04.5_0 295	IFCC con piridossal fosfato / Cobas 702 Roche. CV%: 3	Plasma, verde chiaro litio eparina routine. Verde scuro, litio eparina, urgenze.	1		
Alanina aminotransferasi (ALT, GPT) POCT	90.04.5_0 295p	IFCC modificato senza PP. Piccolo / De Mori	Plasma, verde scuro litio eparina.			
Albumina	90.05.1_2 525	Immunoturbidimetria / Cobas Roche. CV%: 1	Plasma, verde chiaro litio eparina	1		
Albuminuria (Microalbuminuria)	90.33.4_3 new604	Immunoturbidimetria/ Cobas Roche. CV%: 2.5	Urina 24 ore, contenitore senza conservanti acquisibile presso farmacie. Mantenere possibilmente in luogo fresco.	1		
Microalbuminuria estemporanea Early morning per calcolo ACR ACR: albumin, creatinine ratio	90.33.4_4 new663	Immunoturbidimetria/ Cobas Roche. CV%: 2.5	Urina estemporanea. Vasetto sterile con dispositivo per successiva aspirazione Acquisibile presso farmacie.	1		
Aldosterone La richiesta abbinata di basale e clinostatismo è eseguita solo presso UO e Centri Prelievi Ospedalieri. Non è possibile eseguire solo prelievo in clinostatismo.	90.05.3_3 basale/ ortostatismo 759 90.05.3_2 clinostatismo 761	Immunochemiluminescenza/Maglumi Medical Systems. CV%: 2.5	Plasma, viola grande K2EDTA Abbinata clino e ortostatismo: il primo prelievo, in clinostatismo, è effettuato all'utente sdraiato da almeno 45 minuti. L'utente è invitato poi a passeggiare in modo ininterrotto per 45 minuti. Effettuare immediatamente il prelievo in ortostatismo (da seduto). Procedura condivisa con Ambulatorio Ipertensione ULSS 5.	15		Sierare e conservare a -20°C.
Aldosterone urinario	90.05.3_4 7500		Urina 24 ore, contenitore senza conservanti, acquisibile presso	15	Padova	Conservare a -20 °C.

REGIONE DEL VENETO  ULSS5 POLESANA UOC Medicina di Laboratorio	CATALOGO PRESTAZIONI UOC MEDICINA DI LABORATORIO (CPL)	DV/MLAB/09 Rev. 7 Pag. 5/38
---	--	--

			farmacie. Mantenere in luogo fresco durante la raccolta			
Alfa amilasi isoenzimi (frazione pancreatica, Amilasi pancreatica)	90.06.5_0 311	Colorimetrico enzimatico/ Cobas 702 Roche. CV%: 1.7	Plasma, verde litio eparina routine. Verde scuro litio eparina urgenze.	1		
Alfa amilasi totale (Amilasi Alfa)	90.06.4_2 307	Substrato EPS-G7/Colorimetrico enzimatico/ Cobas 702 Roche. CV%: 2	Plasma, verde chiaro litio eparina.	1		
Alfa amilasi totale urinaria	90.06.4_3 461	Vedi alfa amilasi totale. CV%: 3.1	Urina 24 ore. Urina 24 ore, contenitore con carbonato di sodio, ritirabile presso centri prelievi ospedalieri .	1		
Alfa amilasi totale POCT	90.06.4_2 307p	Assorbanza substrato CNPG3 Piccolo/De Mori	Plasma, verde scuro litio eparina			
Alfa 1 antitripsina	90.05.4_0 517		Plasma, verde chiaro litio eparina	8	Mestre	Conservare 48 ore a 2-+8 °C. Per tempi più lunghi sierare e conservare a -20°C
Alfa 1 fetoproteina (AFP)	90.05.5_2 717	ECLIA Elettrochemiluminescenza. Cobas 602 Roche. CV%: 1.8	Plasma, verde chiaro	2		
Alfa1 microglobulina	90.06.2_3 622		Urina 24 ore, contenitore senza conservanti acquisibile presso farmacie. Mantenuta in luogo fresco durante la raccolta.	15	Padova	Conservare 6 giorni a 2-8 °C. Evitare il congelamento
Alfa 2 macroglobulina.	90.06.3_0 7323		Siero, blu elettrico.	8	Padova	Conservare 6 giorni a 2- 8 °C, per tempi più lunghi sierare e conservare a -20°C.
Amfetamina/Metamfetamina/ MDMA (Ecstasy): classe (screening, dosaggio qualitativo) Droghe d'abuso	90.40.8_0 new1251	KIMS: Interazione cinetica di microparticelle in soluzione. Cobas Roche	Urina estemporanea, vasetto sterile giallo. Richiedibile in urgenza da UO Rianimazione previa autorizzazione Dirigente del Laboratorio con risultato entro 24 ore. Vedi anche per aspetti medico legali nota benzodiazepine urinarie.	2		
Aminoacidi totali frazionamento cromatografico. Eseguibile solo presso UO e Centri Prelievi Ospedalieri. Attenzione: test non scaricabile on line. Ritiro presso Centri Consegna Referti.	90.07.2_5 new7375		Plasma, lilla K2 EDTA	35	Padova	Sierare e conservare a -20°C
Amiodarone	90.17.B_9 new7377		Siero, giallo	21	Mestre	Sierare e conservare a 2- +8 °C

 REGIONE DEL VENETO ULSS5 POLESANA UOC Medicina di Laboratorio	CATALOGO PRESTAZIONI UOC MEDICINA DI LABORATORIO (CPL)	DV/MLAB/09 Rev. 7 Pag. 6/38
--	--	--

Ammonio Eseguibile solo presso UO e Centri Prelievi Ospedalieri.	90.07.5_0 273	Enzimatica spettrofotometrica Cobas Roche. CV%: 5.4	Plasma, lilla K2EDTA. Conservare campione refrigerato fino alla consegna in laboratorio entro 10 minuti dal prelievo.	1		Sierare immediatamente. Esecuzione analitica entro 10 minuti . Plasma stabile 2 ore a 2- 8 °C.
Anticorpi anti antigeni epatici IgG	90.52.5_28 554	Immunoblot/Euroimmun	Siero, marrone	20		
Anticorpi anti beta 2 glicoproteina I IgG/IgM.	90.49.6_4 90.49.6_5 7402	CLIA Chemiluminescenza/ BIOFLASH, Werfen	Siero, marrone	20		
Anticorpi anti beta 2 glicoproteina I IgG	90.49.6_4 7402c					
Anticorpi anti beta 2 glicoproteina I IgM	90.49.6_5 7402d					
Anticorpi anti cardiolipina IgG-IgM (ACA)	90.47.5_2 90.47.5_3 575	CLIA Chemiluminescenza/ BIOFLASH, Werfen	Siero marrone	20		
Anticorpi anti cardiolipina IgG	90.47.5_2 575A					
Anticorpi anti cardiolipina IgM	90.47.5_3 575B					
Anticorpi anti cute: IgG anti desmosomi e anti membrana basale. Test qualitativo	90.52.5_4 7523		Siero, giallo	22	Mestre	Sierare e conservare a 2- +8 °C
Anticorpi anti cellule parietali gastriche (APCA, PCA).	90.48.1_0 561	Immunofluorescenza indir./QUANTA Link, Werfen	Siero, marrone	20		
Anticorpi anti citoplasma dei neutrofili (ANCA): Anticorpi anti mieloperossidasi (MPO) 90.51.6_0 Anticorpi anti proteinasi 3 (PR3s) 90.53.8_0.	90.48.2_0 580	CLIA Chemiluminescenza/ BIOFLASH, Werfen	Siero, marrone	20		
Anticorpi anti DNA nativo (nDNA F.E.I.A., test screening)	90.48.3_2 new554	CLIA Chemiluminescenza/ BIOFLASH, Werfen	Siero, marrone. E' eseguito il test di conferma (90.48.3_3) solo in caso di positività del test di screening.	20		
Anticorpi anti DNA nativo (nDNA I.F.I. Test di conferma)	90.48.3_3 new554	Immunofluorescenza indir./QUANTA Link, Werfen	Siero, marrone.	20		
Anticorpi anti endomisio IgA (EMA)	90.47.E_0 569	Immunofluorescenza indir./QUANTA Link, Werfen	Siero, marrone	20		
Anticorpi anti antigeni intracellulari - ENA screening (CTD screening)	90.47.3_0 581	CLIA Chemiluminescenza/ BIOFLASH, Werfen	Siero, marrone	20		
Anticorpi anti antigeni intracellulari anti-JO1	90.47.7_0 582	CLIA Chemiluminescenza/ BIOFLASH, Werfen	Siero, marrone	20		
Anticorpi anti antigeni intracellulari : anti-RNP	90.47.8_0 582	CLIA Chemiluminescenza/ BIOFLASH, Werfen	Siero, marrone	20		
Anticorpi anti antigeni intracellulari anti Scl-70	90.47.9_0 582	CLIA Chemiluminescenza/ BIOFLASH, Werfen	Siero, marrone	20		

 REGIONE DEL VENETO ULSS5 POLESANA UOC Medicina di Laboratorio	CATALOGO PRESTAZIONI UOC MEDICINA DI LABORATORIO (CPL)	DV/MLAB/09 Rev. 7 Pag. 7/38
--	--	--

Anticorpi anti antigeni intracellulari anti-Sm	90.47.A_0 582	CLIA Chemiluminescenza/ BIOFLASH, Werfen	Siero, marrone	20		
Anticorpi anti antigeni intracellulari anti -SS-A Ro 60	90.47.B_3 new581c60	CLIA Chemiluminescenza/ BIOFLASH, Werfen	Siero, marrone	20		
Anticorpi anti antigeni intracellulari anti -SS-A Ro 52	90.47.B_4 new581c52	CLIA Chemiluminescenza/ BIOFLASH, Werfen	Siero, marrone	20		
Anticorpi anti antigeni intracellulari anti-SS-B	90.47.C_0 582	CLIA Chemiluminescenza/ BIOFLASH, Werfen	Siero, marrone	20		
Anticorpi anti fattore intrinseco (IFA)	90.52.5_9 7399		Siero, blu elettrico	15	Padova	Conservare 48 ore a 2-8 °C. Per tempi più lunghi sierare e conservare a -20 °C.
Anticorpi anti fosfolipidi: accettare anticorpi anticardiolipina IgG/IgM e anticorpi anti beta 2 glicoproteina I IgG/IgM.						
Anticorpi anti glutammico decarbossilasi (GAD)	90.49.7_0 7363		Siero, giallo	15	Mestre	Conservare a 2-8 C°
Anticorpi anti insula pancreatica, anti beta- cellula, (ICA-IgG)	90.50.5_0 7359		Siero, giallo	15	Mestre	Conservare a 2-8 °C
Anticorpi anti glicoproteina mielina associata (MAG)	90.51.3_0 7371		Siero, blu elettrico	35	Padova	Sierare e conservare a -20°C.
Anticorpi anti microsomi epatici e renali (LKMA)	90.51.5_0 563	Immunofluorescenza indir./QUANTA Link, Werfen	Siero, marrone	20		
Anticorpi anti miosite	90.52.5_26 556	Immunoblot / Euroimmun	Siero, marrone	20		
Anticorpi anti mitocondri (AMA)	90.52.1_0 557	Immunofluorescenza indir./QUANTA Link, Werfen	Siero, marrone	20		
Anticorpi anti muscolo liscio (ASMA)	90.52.2_0 559	Immunofluorescenza indir./QUANTA Link, Werfen	Siero, marrone	20		
Anticorpi anti antigeni intracellulari (ANA)	90.52.4_0 551	Immunofluorescenza indir./QUANTA Link, Werfen	Siero, marrone	20		
Anticorpi anti antigeni intracellulari (ANA Reflex) Il test ANA Reflex comprende la ricerca degli anticorpi anti antigeni intracellulare (ANA) in IFI e CTD screening. Le regole per gli approfondimenti sono le seguenti: • ANA e CTD screen negativi: nessun approfondimento • ANA $\geq$ 1:160 e CTD screen negativo: approfondimenti sulla base del quadro fluoroscopico • ANA negativo e CTD screen positivo: ricerca dei singoli antigeni intracellulari (ENA) • ANA $\geq$ 1:160 e CTD screening positivo:	90.524_0 new551	Immunofluorescenza indir./QUANTA Link, Werfen	Siero, marrone	20		

 REGIONE DEL VENETO ULSS5 POLESANA UOC Medicina di Laboratorio	CATALOGO PRESTAZIONI UOC MEDICINA DI LABORATORIO (CPL)	DV/MLAB/09 Rev. 7 Pag. 8/38
--	---	--

ricerca dei singoli antigeni intracellulari (ENA) più eventuali approfondimenti in immunoblot						
Anticorpi anti peptidi citrullinati (Anticorpi anti citrulina)	90.47.D_0 587	CLIA Chemiluminescenza/ BIOFLASH, Werfen	Siero, marrone	20		
Anticorpi anti peptidi deamidati della gliadina IgG	90.49.5_0 new597b	CLIA Chemiluminescenza/ BIOFLASH, Werfen	Siero, marrone.	20		
Anticorpi anti proteinasi 3: vedi anticorpi citoplasma dei neutrofili			Siero, marrone			
Anticorpi anti recettore Acetilcolina (ARAB, anti AchR)	90.53.9_0 7357		Siero, blu elettrico	20	Padova	Sierare e conservare 1 giorno a 2-8 °C. Per tempi più lunghi a -20°C.
Anticorpi anti Saccaromyces Cerevisiae (ASCA) IgG	90.53.A_2 590		Siero, giallo	12	Mestre	Conservare a 2-8 °C
Anticorpi anti Saccaromyces Cerevisiae (ASCA) IgA	90.53.A_3 590		Siero, giallo	12	Mestre	Conservare a 2-8 °C
Anticorpi anti surrene	90.54.3_2 new7381		Siero, giallo.	14	Mestre	Conservare a 2-8 °C
Anticorpi anti tireoglobulina (AbTG)	90.54.4_0 565	ECLIA Elettrochemiluminescenza. Cobas 601 Roche. Adria CV%: 20	Siero, marrone.	6		Conservare massimo 4 giorni a 2-8 °C , 2 mesi sierato a -20°C, congelare una sola volta
Anticorpi anti tireoperossidasi (TPO) (anti microsomi tiroide)	90.51.4_0 new567	ECLIA Elettrochemiluminescenza. Cobas 601 Roche. Adria. CV%: 20	Siero, marrone.	6		Conservare 3 giorni a 2-8 °C, 1 mese sierato a -20 °C. Congelare solo 1 volta.
Anticorpi anti tirosin chinasi (IA-2) anti tirosina fosfatasi.	90.52.5_12 7379		Siero, Blu elettrico	20	Padova	Conservare 5 giorni a 2-8°C, sierato 3 mesi a -20°C.
Anticorpi anti transglutaminasi IgA. Sono accettate in automatico anche IgA totali.	90.53.D_2 585	CLIA Chemiluminescenza/ BIOFLASH, Werfen	Siero, marrone.	20		
Anticorpi anti transglutaminasi IgG	90.53.D_3 585a	CLIA Chemiluminescenza/ BIOFLASH, Werfen	Siero, marrone.	20		
Anticorpi anti transglutaminasi adulto monitoraggio:	90.53.D_4 new585					
Antidepressivi triciclici (classe, dosaggio quantitativo tra cui imipramina e amitriptilina)	90.17.C_45 new1227	Immunodosaggio. Rilevazione enzimatica G6PDH/Werfen/ Cobas 502 Roche. CV%: 10	Plasma, verde chiaro litio eparina. Plasma verde scuro litio eparina urgenze.	2		
Antigene carboidratico CA 15.3	90.55.2_0 753	ECLIA Elettrochemiluminescenza. Cobas 602 Roche. CV%: 10	Plasma, verde chiaro litio eparina	2		
Antigene carboidratico CA 19.9 (GICA)	90.55.3_2 new749	ECLIA Elettrochemiluminescenza. Cobas 602 Roche. CV%:10	Plasma, verde chiaro litio eparina	2		

 REGIONE DEL VENETO ULSS5 POLESANA UOC Medicina di Laboratorio	CATALOGO PRESTAZIONI UOC MEDICINA DI LABORATORIO (CPL)	DV/MLAB/09 Rev. 7 Pag. 9/38
--	---	--

Antigene carboidratico CA125	90.55.1_0 751	ECLIA Elettrochemiluminescenza. Cobas 602 Roche. CV%: 10	Plasma, verde chiaro litio eparina	2		
Antigene carboidratico CA 50	90.55.3_3 new7333		Siero, blu elettrico	17	Padova	Conservare 30 giorni a 2-8 °C. Sierato fino a 3 mesi a -20°C.
Antigene carboidratico CA 72.4	90.55.3_4 new7335		Siero, marrone	19	Mestre	Conservare a 2-8°C.
Antigene polipeptidico tissutale (TPA)	90.55.3_5 new7009		Siero, blu elettrico	18	Padova	Conservare 24 ore a 2-8 °C, per periodi più lunghi sierato a -20°C
Anti Mulleriano Ormone (AMH) Solo per esterni	90.17.G_0 new7014	Chiemiluminescenza/ Beckman Coulter/ Access Trecenta	Siero, blu grande	10		Conservare a 2-8 °C.
Antitrombina funzionale (AT3, Antitrombina III)	90.57.5_0 1107	Cromogenico/ STAR R Max 3 STAGO CV%: 6	Plasma, celeste sodio citrato. Consegna entro 4 ore dal prelievo.	1		
Apixaban Richiedibile solo in urgenza per ricoverati e PS. Eseguito solo a Rovigo.	90.63.1_3 new1135	Cromogenico anti X attivato / STAR R Max 3 STAGO CV%: 3	Plasma, celeste sodio citrato. Consegna entro 4 ore dal prelievo.			
Apolipoproteina- A1 (Apo A)	90.08.4_0 263a		Plasma, verde chiaro litio eparina.	3	Padova	Sierare e conservare 3 giorni a 2-8 °C. Per tempi più lunghi a -20°C.
Apolipoproteina B (Apo B)	90.08.5_0 265b		Plasma, verde chiaro litio eparina.	3	Padova	Sierare e conservare 3 giorni a 2-8 °C. Per tempi più lunghi a -20°C.
Aptoglobina (HPT)	90.09.1_0 523	Turbidimetrico Cobas 502 Roche. CV%: 8	Plasma, verde chiaro litio eparina routine, verde scuro litio eparina urgenze	1		
Aspartato aminotransferasi (AST, GOT)	90.09.2_0 293	IFCC con piridossal fosfato Cobas 702 Roche CV%: 3	Plasma, verde chiaro litio eparina	1		
Bande oligoclonali Richiedibile solo in urgenza per ricoverati e PS.	90.69.4_13 new548		Liquor, provetta con tappo rosso a vite. Effettuare contestuale prelievo venoso: Siero, rosa.	25	Padova	Liquor: conservare (senza centrifugare) a -20 c°. Siero: sierare e conservare a -20 C°
BCR/ABL (Cromosoma Philadelphia) qualitativo per diagnosi Eseguibile solo presso UO e Centri Prelievi Ospedalieri. dal lunedì a giovedì Attenzione: test non scaricabile on line. Ritiro presso Centri Consegna Referti.	G8.01_16 new599a Nota per gli amministrativi: il campione deve essere accompagnato: per interni: dal MOD/MLAB/15 Esami extra aziendali; per esterni: da impegnativa con il quesito diagnostico e da MOD/MLAB/15 compilato dall'amministrativo		Sangue intero, Viola grande K2 EDTA, 4 provette. Conservare campione refrigerato.	40	IOV	Conservare 24 ore campione tal quale a 2-8 C°

REGIONE DEL VENETO  ULSS5 POLESANA UOC Medicina di Laboratorio	CATALOGO PRESTAZIONI UOC MEDICINA DI LABORATORIO (CPL)	DV/MLAB/09 Rev. 7 Pag. 10/38
---	--	---

	Lab . Copia dei documenti deve essere inviata allo IOV e conservata in Segreteria Lab. per la tracciabilità (inviante) dei referti cartacei.					
BCR/ABL (Cromosoma Philadelphia) quantitativo per monitoraggio terapia Esecuzione prelievo solo presso UO e Centri Prelievi Ospedalieri dal lunedì a giovedì Attenzione: test non scaricabile on line. Ritiro presso Centri Consegna Referti. E' necessario anche il MOD/MLAB/15 esami rari extraaziendali	G8.01_17 new621a		Sangue intero, viola grande K2 EDTA, 4 provette Conservare campione refrigerato.	40	IOV	
Bence Jones (proteinuria di...)	90.69.2_3 610	Gel di agarosio/ Hydragel/Sebia	Urina II° minzione o estemporanea. Vasetto sterile con dispositivo per successiva aspirazione sottovuoto. Acquisibile presso farmacie.	8		
Benzodiazepine (Classe, dosaggio qualitativo).	90.17.C_27 new1201	Immunodosaggio enzimatico. Subfornitore Roche: Thermo Scientific Cobas 502 Roche	Plasma, verde chiaro litio eparina	2		
Benzodiazepine Screening, classe, dosaggio qualitativo.	90.17.C_28 new1203	Immunodosaggio enzimatico. Subfornitore Roche: Thermo Scientific Cobas 502 Roche	Urina estemporanea, vasetto sterile giallo. Richiedibile anche come urgenti solo da UO Rianimazione, previa autorizzazione Dirigente reperibile del Laboratorio, con risultato entro 24 ore.	2		Conservare 5 giorni a 2- 8 °C. Per tempi più lunghi conservare a – 20 C°.
Beta 2 microglobulina	90.10.1_2 7011	Immunoturbidimetria/ Cobas 501 Roche Adria. CV%: 5.8	Siero, marrone.	8		Sierare, 3 giorni a 2- 8 °C. Per tempi più lunghi conservare a – 20 C°.
Beta 2 microglobulina urinaria	90.10.1_3 7509	CV%: 5	Urina 24 ore. Contenitore acquisibile presso farmacie.	8	Padova	Conservare 8 giorni a 2-8 °C. Per tempi più lunghi a – 20 C°.
Bicarbonati (Idrogeno carbonato) Eseguibile solo presso UO e Centri Prelievi Ospedalieri.	90.10.2_2 1095d	Elettrochimica / Gem Premier 5000 Werfen	Sangue intero venoso in siringa eparinata	1		
Bilirubina reflex Cut-off >1 mg/dL. Incluso: Bilirubina diretta ed indiretta. Non associabile a 90.10.07.	90.10.5_3 new210	Colorimetrico/ Cobas 702 Roche CV%: 2.6	Plasma, verde chiaro litio eparina.	1		
Bilirubina diretta	90.10.7_0	Colorimetrico/	Plasma, verde	1		

 REGIONE DEL VENETO ULSS5 POLESANA UOC Medicina di Laboratorio	CATALOGO PRESTAZIONI UOC MEDICINA DI LABORATORIO (CPL)	DV/MLAB/09 Rev. 7 Pag. 11/38
--	--	---

	new213d	Cobas 702 Roche CV%: 2.6	chiaro litio eparina			
Bilirubina totale urgenza	211	Colorimetrico/ Cobas 702 Roche CV%: 2.6	Plasma, verde scuro litio eparina			
Bilirubina totale POCT	211p	Bilirubina ossidasi/ Piccolo De Mori	Plasma, verde scuro litio eparina urgenze			
Buprenorfina (screening, dosaggio qualitativo)	90.40.9_28 new1263	Immunoenzimatico/ Cobas 502 Roche	Urina estemporanea, vasetto sterile. Richiedibile in urgenza da UO Rianimazione previa autorizzazione Dirigente del Laboratorio con risultato entro 24 ore.			Conservare 5 giorni a 2- 8 °C. Per tempi più lunghi conservare a - 20 C°.
Calcio totale (calcemia)	90.11.4_2 227	Colorimetrico o-cresolfaleina/ Cobas 702 Roche CV%: 1.4	Plasma, verde chiaro litio eparina, verde scuro litio eparina urgenze	1		
Calcio totale POCT	90.11.4_2 227p	Assorbanza Arsenazo III. Piccolo /de Mori	Plasma, verde scuro litio eparina			
Calcio totale urine (calciuria)	90.11.4_3 418	o-cresolfaleina/ Cobas Roche. CV%: 1.8	Urina 24 ore senza conservati mantenuta possibilmente in luogo fresco durante la raccolta. Contenitore acquisibile presso farmacie.	1		
Calcio ionizzato (ione), Ca++ Eseguibile solo presso UO e Centri Prelievi Ospedalieri.	90.11.7_0 new245	Elettrochimica / Gem Premier 5000 Werfen	Sangue intero venoso in siringa eparinata refrigerata	1		
Calcoli urinari ricerca qualitativa	90.12.1_0 new631	Esame chimico	Calcoli, contenitore da urinocultura. Acquisibile presso farmacie.	8	Padova	.
Calcitonina. Eseguibile solo presso UO e Centri Prelievi Ospedalieri.	90.11.5_2 7315	ECLIA Elettrochemiluminesce nza. Cobas 602 Roche.	Siero, marrone. Conservare campione refrigerato.	2		Sierare entro 1 ora dal prelievo e conservare a 2-8 °C (massimo 1 giorno). Per tempi più lunghi conservare a -20 °C. Congelare solo 1 volta.
Calprotectina	90.12.A_0 797		Feci contenitore standard con cucchiaino acquisibile presso le farmacie. Campione conservato a temperatura ambiente se consegnato il giorno della raccolta o refrigerato fino a 3 giorni e consegnato refrigerato.	15	Padova	Conservare per tre giorni a 2- 8 °C. Per tempi più lunghi a - 20 C°
Cannabinoidi, THC (delta-9- tetraidrocannabinolo): screening, dosaggio qualitativo. Droghe d'abuso	90.40.9_7 new1253	IIMS: Interazione cinetica di microparticelle in soluzione. Cobas 502 Roche CV%: 5.5	Urina estemporanea, vasetto sterile giallo. Vedi per modalità di richiesta Benzodiazepine screening	2		Conservare 5 giorni a 2- 8 °C. Per tempi più lunghi conservare a - 20 C°.
Carbamazepina	90.17.C_29	KIMS: Interazione	Siero, verde litio	2		

 REGIONE DEL VENETO ULSS5 POLESANA UOC Medicina di Laboratorio	CATALOGO PRESTAZIONI UOC MEDICINA DI LABORATORIO (CPL)	DV/MLAB/09 Rev. 7 Pag. 12/38
--	--	---

	new1239	cinetica di microparticelle in soluzione. Cobas 502 Roche CV%: 10	eparina			
Catene leggere libere kappa e lambda (Free Light Chain). Nota per il prescrittore: accettare sempre entrambi i codici	90.28.7_2 90.28.7_3 new540	Immunoturbidimetria. Optilite/Binding Site	Siero, rosa.	9		
CEA (Antigene carcino embrionario)	90.56.3_2 new733	ECLIA Elettrochemiluminescenza. Cobas Roche CV%: 2.9	Plasma, verde chiaro litio eparina	2		
Genetica Celiachia Locus HLA DQA1 (alleli 0201, 03,05 Locus HLA-DQB1 (alleli 02, 0302)	90.80.2_0 90.80.4_0 572 + 1127a	Biologia molecolare	Sangue intero, lilla K2EDTA.	15	Padova	Refrigerare 7 giorni a 2-8 °C.
Ceruloplasmina (COE)	90.12.5_0 519		Siero, giallo	12	Mestre	Conservare 3 giorni a 2-8 °C.
Ciclosporina A	90.17.B_5 new1205	ECLIA Elettrochemiluminescenza. Cobas 601 Roche, Adria	Sangue intero, lilla K2EDTA	4		Conservare 7 giorni a 2-8 °C. Per tempi più lunghi a - 20 °C.
Cistatina C	90.13.A_0 7391		Siero blu	10	Padova	Sierare e conservare 8 giorni a 2-8 °C
Citologia urinaria (Es. citologico urine per ricerca cellule neoplastiche)	91.39.4_0 7951		Urine. I contenitori con conservante (metanolo) sono forniti dai centri prelievi aziendali. Test di competenza UOC Anatomia Patologica			
CK (CPK o Creatinchinasi)	90.15.4_2 291	IFCC/ Cobas Roche CV% : 0.9	Plasma, verde chiaro litio eparina. Verde scuro litio eparina urgenze	1		
Cloro	90.13.3_2 225	ISE indiretto/ Cobas ISE Roche CV%: 3	Plasma, verde chiaro litio eparina , Verde scuro litio eparina urgenze Consegna entro 4 ore dal prelievo	1		
Cloro (Cloruria)	90.13.3_4 414	ISE indiretto/ Cobas Roche CV%: 4	Urina 24 ore, contenitore senza conservati. Acquisibile presso farmacie. Mantenere possibilmente in luogo fresco durante la raccolta	1		
Clozapina LEA solo per residenti Regione Veneto. Per Utenti extra Veneto eseguibile come Privati Paganti.	90.17.B_43 new7041		Siero, blu	10	Padova	Conservare 3 giorni a 2-8 °C. Per tempi più lunghi a - 20 °C
Cocaina (screening) Droghe d'abuso	90.40.9_9 new1255	KIMS: Interazione cinetica di microparticelle in soluzione. Cobas 502 Roche CV%: 5.3	Urina estemporanea, vasetto sterile giallo. Vedi per modalità di richiesta Benzodiazepine screening	2		Conservare 5 giorni a 2- 8 °C. Per tempi più lunghi conservare a - 20 °C.
Colesterolo totale	90.14.3_0	CHOD/POD/	Plasma, verde chiaro	1		

REGIONE DEL VENETO  ULSS5 POLESANA UOC Medicina di Laboratorio	CATALOGO PRESTAZIONI UOC MEDICINA DI LABORATORIO (CPL)	DV/MLAB/09 Rev. 7 Pag. 13/38
---	--	---

	255	Cobas Roche CV%: 1.5	litio eparina			
Colesterolo HDL	90.14.1_0 257	enzimatico/colorim. diretto/ Cobas Roche CV%: 1.1	Plasma, verde chiaro litio eparina	1		
Colesterolo LDL diretto	90.13.C_0 new261	Metodo diretto enzimatico colorimetrico in fase omogenea. Cobas 702 Roche CV%: 2.1	Plasma, verde chiaro litio eparina	1		
Colinesterasi (CHE) (Pseudocolinesterasi)	90.14.4_0 305	Substrato butiriltilcolina Cobas Roche CV%: 1.9	Plasma, verde chiaro litio eparina.	1		
Complemento C3	90.60.2_3 529	Turbidimetria Cobas 601 Roche, Adria CV%: 1.8	Siero, marrone	2		Conservare 8 giorni a 2-8 °C. Sierare e conservare 8 giorni – 20 °C Congelare solo 1 volta.
Complemento C4	90.60.2_5 531	Turbidimetria Cobas 601 Roche, Adria CV%: 1.6	Siero, marrone	2		Conservare 8 giorni a 2-8 °C. Sierare e conservare 8 giorni – 20 °C Congelare solo 1 volta.
Complemento (C1 esterasi inibitore quantitativo)	90.60.1_0 521		Siero, rosa	15	Padova	Sierare e conservare 8 giorni a 2-8 °C. Per tempi più lunghi a – 20 °C
Copeptina (sostituisce ADH)	90.04.1_3 new7313		Siero, blu	10	Padova	Conservare 24 h a 2- 8 °C, per periodi più lunghi sierare e conservare -20°C
Coombs Indiretto (anticorpi anti eritrociti nel plasma)	90.49.3_0 7809		Plasma, viola grande K2 EDTA Test di competenza UOC Medicina Trasfusionale			
Coombs diretto (anticorpi anti eritrociti adesi alle emazie)	90.58.2_0 7807		Sangue intero, viola grande K2 EDTA Test di competenza UOC Medicina Trasfusionale			
Corticotropina (ACTH) Eseguibile solo presso UO e Centri Prelievi Ospedalieri. In caso di richiesta abbinata delle ore 8 e 16-18 entrambi i prelievi sono effettuati a Rovigo. Non è possibile eseguire solo prelievo 16-18. Per la richiesta ore 16-18 l'utente esegue il prelievo in PS di Rovigo portando con se la provetta con etichetta barcode accettata al mattino. Il PS invia la provetta al laboratorio tramite posta pneumatica.	90.15.2_2 7027 (ore 8) 90.15.2_3 7029 (ore 16 -18)	ECLIA Elettrochemiluminesce nza. Cobas 602 Roche. CV%: 3.4	Plasma, lilla K2EDTA . Usare solo provette prerrefrigerate. Conservare il campione refrigerato.	6		Sierare immediatamente e conservare a -20°C

 REGIONE DEL VENETO ULSS5 POLESANA UOC Medicina di Laboratorio	CATALOGO PRESTAZIONI UOC MEDICINA DI LABORATORIO (CPL)	DV/MLAB/09 Rev. 7 Pag. 14/38
--	--	---

Cortisolo salivare mattino Eseguibile solo presso UO e Centri Prelievi Ospedalieri.	90.15.3_6 743s (ore 8)		Saliva, dispositivo Salivette in cotone disponibile, negli orari di apertura, presso Centri Prelievi Ospedalieri unitamente alla modalità della raccolta saliva. Il campione può essere conservato in frigorifero fino al massimo di 3 giorni.	15	Padova	Centrifugare la salivette a 3000giri/min per 10 minuti; conservare a la salivette centrifugata fino a 3 giorni; Per tempi più lunghi conservare a -20°C
Cortisolo salivare sera Eseguibile solo presso UO e Centri Prelievi Ospedalieri.	90.15.3_7 743ss (ore 23)		Vedi Cortisolo salivare mattino.	15	Padova	Vedi cortisolo salivare mattino.
Cortisolo. In caso di richiesta comprensiva delle ore 8 e 16-18 entrambi i prelievi sono effettuati a Rovigo. Per la richiesta ore 16-18 l'utente esegue il prelievo in PS di Rovigo portando con se la provetta con etichetta barcode accettata al mattino. Il PS invia la provetta al laboratorio tramite posta pneumatica.	90.15.3_2 743 (ore 8) 90.15.3_3 745 (ore 16 - 18)	ECLIA Elettrochemiluminescenza. Cobas Roche.	Plasma , verde	2		
Cortisolo urinario (cortisoluria)	90.15.3_4 7504		Urina 24 ore contenitore senza conservati. Acquisibile presso farmacie. Mantenere in luogo fresco durante la raccolta	20	Padova	Conservare 7 giorni a 2-8 °C. Per tempi più lunghi conservare a -20°C
C Peptide basale - profilo digiuno.	90.11.1_2 7015		Siero, marrone.	8	Mestre	Sierare e conservare a -20 ° C
Creatinina con eGFR	90.16.3_2 207	Enzimatico (creatininasi), Roche 702 Calcolo eGFR con formula CKD-EPI (Chronic Kidney Disease Epidemiology): creatinina ed età paziente. CV%: 1.2	Plasma, verde chiaro litio eparina, Verde scuro litio eparina urgenze In automatico è fornito eGFR.	1		
Creatinina POCT	90.16.3_2 207p	Spettrofotometria.Creatinina amidoidralasi e Sarcosina ossidasi/ Piccolo De Mori	Plasma, verde scuro litio eparina urgenze			
Creatinina nelle urine	90.16.3_3 402	Colorimetrico cinetico/ Cobas Roche CV%: 1.5	Urina 24 ore, contenitore senza conservati. Acquisibile presso farmacie. Mantenere refrigerato durante la raccolta	1		

 REGIONE DEL VENETO ULSS5 POLESANA UOC Medicina di Laboratorio	CATALOGO PRESTAZIONI UOC MEDICINA DI LABORATORIO (CPL)	DV/MLAB/09 Rev. 7 Pag. 15/38
--	---	---

Creatinina clearance	90.16.4_0 400 Nota per amministrativi. In caso di esenzione 013 (diabete) e 023 (nefropatici) è possibile accettare l'esame anche se l'utente non consegna l'urina. In questo modo è eseguita la creatinina ematica con eGFR che l'esenzione non contempla. In nota amministrativo scrive "esenzione 013 o 023"	Calcolo	Plasma, verde litio eparina routine contestualmente a Urina 24 ore contenitore senza conservati acquisibile presso farmacie. Mantenere possibilmente in luogo fresco durante la raccolta. Viene refertata automaticamente anche creatinina, e cratininuria.	1		
Crioaglutinine Effettuabile solo nei reparti e centri prelievi ospedalieri per immediato trattamento (la provetta va consegnata immediatamente al Centro Trasfusionale).	90.46.3_0		Siero, rossa. Test di competenza UOC Medicina Trasfusionale.			Consegna immediata al Centro Trasfusionale
Crioagglutinine Effettuabile solo nelle UO e Centri Prelievi Ospedalieri . Effettuare il prelievo con dispositivi e provetta riscaldati a 37°C. Subito dopo il prelievo trasportare immediatamente la provetta in laboratorio e consegnarla di persona ad un tecnico.	90.61.1_0 507	Visivo	Siero, rosa.	7		
Cromogranina A	90.16.6_0 7321		Plasma, lilla/K2 EDTA	19	Mestre	Centrifugare aliquotare e conservare a 2- 8°C
CTX (Telopeptide C-terminale del collagene di tipo I o Beta Cros Laps)	90.41.6_2 new7387	ECLIA Elettrochemiluminescenza. Cobas 601 Roche Adria. CV%: 3.8	Plasma, lilla/K2 EDTA.	10		Sierare e congelare a -20°C.
Cyfra 21-1	90.61.3_0 7337		Siero, marrone	10	Mestre	Centrifugare e conservare a 2- 8°C
Dabigatran ECT (Tempo di Ecarina) Disponibile solo in urgenza per i ricoverati e PS. Eseguito solo a Rovigo.	90.63.8_2 new1139	Cromogenico anti fatt II, Tempo di Ecarina (ECT) STAR R Max 3 STAGO. CV%: 3	Plasma, celeste sodio citrato. Consegna entro 4 ore dal prelievo			
D-dimero	90.61.4_0 1109	Immunoturbidimetrico STAR R Max 3 STAGO. CV%: 9	Plasma, celeste sodio citrato. Consegna entro 4 ore dal prelievo	1		
D-dimero POCT	90.61.4_0 1109pp	Immunofluorescenza AQT 90 De Mori	Plasma, lilla/K2 EDTA. Consegna entro 4 ore dal prelievo			
Delta 4 androstenedione (Androstenedione)	90.17.3_0 7033		Siero, marrone	13	Mestre	Centrifugare e conservare a 2- 8°C

 REGIONE DEL VENETO ULSS5 POLESANA UOC Medicina di Laboratorio	CATALOGO PRESTAZIONI UOC MEDICINA DI LABORATORIO (CPL)	DV/MLAB/09 Rev. 7 Pag. 16/38
--	--	---

Deidroepiandrosterone solfato (DEA solfato, DHEA-solfato)	90.17.2_0 7005	ECLIA Elettrochemiluminescenza. Cobas 601 Roche Adria. CV%:15	Siero, marrone.	6		Conservare 14 giorni a 2-8 °C. Per tempi più lunghi sierare e conservare a -20°C. Congelare una sola volta
Determinazione di rischio prenatale per sindrome di Down (1° trimestre): HCG frazione libera e PAPP-A. Attenzione: test non scaricabile on line. Ritiro presso Centri Consegna Referti.	90.17.6_2 new791 Nota per amministrativi: Per Bi test, o test combinato si intende l'associazione della prestazione di Laboratorio 90.17.6_2 + l'ecografia ostetrica e scheda ginecologica eseguita da ginecologi dell' ULSS 5 Polesana. Senza Ecografia/scheda ginecologica sono refertati esclusivamente HCG f. libera e PAPP-A. L'amministrativo in accettazione segnala in note l'assenza della scheda ginecologica	ECLIA Elettrochemiluminescenza Cobas Trecenta	Siero, blu. Biochimica: HCG f. libera e PAPP-A: competenza UOC Medicina di Laboratorio. Bi Test o test combinato: competenza UOC Ginecologia ed Ostetricia.	Esecuzione analitica effettuata il martedì.		Conservare 8 giorni a 2-8 °C.
Diidrotestosterone DDOHT DHT	90.17.5_0 7325		Siero, blu	22	Padova	Conservare 24 ore a 2-8 °C. Per tempi più lunghi a -20 °C
Digossina	90.17.C_31 new1233	KIMS Interazione cinetica di microparticelle in soluzione. Cobas 502 Roche CV%: 3.8	Plasma, verde chiaro litio eparina. Verde scuro litio eparina urgenze	1		
Edoxaban Disponibile solo in urgenza per i ricoverati e PS. Eseguito solo a Rovigo.	90.63.1_4 new1141	Cromogenico anti X attivato / STAR Evolution STAGO	Plasma, celeste sodio citrato. Consegna entro 4 ore dal prelievo.			
Elettroforesi delle proteine sieriche (protidogramma) E' incluso il dosaggio delle Proteine totali	90.38.4_0 544	Capillare/Capillarys 3 Sebia	Siero, gialla	8		
Elettroforesi urinaria: non eseguita. Nota per i prescrittori: Per valutare proteinuria non selettiva consigliato IgG urinaria. Per proteinuria selettiva: ACR (albumin, creatinine ratio). Per MGUS e/o Mieloma: Bence Jones						
Emocromo	90.62.2_2 1001	Impedenza/Ottico/ fluorescenza. Sysmex/Dasit XN CV% GR: 1.3 CV% Hb: 1.1 CV% Plt: 2.5 CV% GB: 2	Sangue intero, lilla K2EDTA.	1		

 REGIONE DEL VENETO ULSS5 POLESANA UOC Medicina di Laboratorio	CATALOGO PRESTAZIONI UOC MEDICINA DI LABORATORIO (CPL)	DV/MLAB/09 Rev. 7 Pag. 17/38
--	--	---

Emocromo POCT	90.62.2_2 1001p	Impedenziometria/ Micros ES 60/ Horiba	Sangue intero, lilla K2EDTA			
Emogas venoso Eseguibile solo presso UO e Centri Prelievi Ospedalieri.	89.66_2 1095	Elettrochimica e parametri calcolati / Gem 5000 Premier Werfen CV%: 4	Sangue intero, Siringa eparinata. Conservare campione refrigerato fino alla consegna immediata in laboratorio.	1		
Emogas arterioso Eseguibile solo presso UO Ospedalieri. Richiedibili per utenti esterni, con prenotazione CUP a 72 ore come visita pneumologia per emogasanalisi arterioso.	89.65.1_2 1097	Elettrochimica e parametri calcolati / Gem 5000 Premier Werfen CV%: 4	Sangue intero, Siringa eparinata. Conservare campione refrigerato fino alla consegna immediata al laboratorio.	1		
Emoglobina Glicata (HbA1c)	90.28.1_2 new269	Capillare/ Capillarys 3 /Sebia	Sangue intero, lilla/K2EDTA	5		
Emoglobina A2	90.66.7_2 7901		Sangue intero, lilla K2EDTA 3ml Test di competenza UOC Medicina Trasfusionale	30		
Emoglobina F						
Emoglobine anomale (HbS, HbC, altro)						
Enzima di conversione dell' angiotensina (ACE).	90.17.E_0 7305		Plasma, verde chiaro litio eparina	14	Padova	Sierare e conservare 8 giorni a 2-8°C. Per tempi più lunghi sierare e conservare a -20 °C
Eosinofili nasali Eseguibile solo presso UO e Centri Prelievi Ospedalieri.	90.62.5_2 1019	Striscio, es. microscopico colorato con May Grunwald Giemsa	Muco nasale di ciascuna narice strisciato su 2 vetrini	2		
Epatite B (HBV) anticorpi anti HBsAg Richiedibile in urgenza da UO e PS solo per: a) incidenti occupazionali solo per il lavoratore infortunato. b) espanto d'organi c) madri partorienti con stato sierologico non noto d) violenza sessuale	7827A	ECLIA Elettrochemiluminesce nza. Cobas 801 Roche	Plasma, lilla, K2EDTA.			
Epatite B HBsAg Virus Epatite B (HBV) Antigene HBsAg Richiedibile in urgenza da UO e PS solo per: a) incidenti occupazionali b) espanto d'organi c) madri partorienti con stato sierologico non noto d) violenza sessuale	7823A	ECLIA Elettrochemiluminesce nza. Cobas 801 Roche.	Plasma, lilla, K2EDTA			
Epatite C anticorpi Virus Epatite C (HCV) anticorpi Richiedibile in urgenza da UO e PS solo per: a) incidenti occupazionali b) espanto d'organi c) madri partorienti con stato sierologico non noto d) violenza sessuale	7839A	ECLIA Elettrochemiluminesce nza. Cobas 801 Roche	Plasma, lilla, K2EDTA			

 REGIONE DEL VENETO ULSS5 POLESANA UOC Medicina di Laboratorio	CATALOGO PRESTAZIONI UOC MEDICINA DI LABORATORIO (CPL)	DV/MLAB/09 Rev. 7 Pag. 18/38
--	--	---

Eritropoietina (EPO)	90.18.5_0 7309		Siero, marrone	12	Mestre	Sierare e aliquotare Conservare a -20°C
Estradiolo (E2) (17 beta estradiolo)	90.19.2_2 723	ECLIA Elettrochemiluminescenza. Cobas 601 Roche.Trecenta CV%: 15	Siero, blu. A Trecenta per PMA, verde chiaro.	3		Conservare 2 giorni a 2-8°C. Per tempi più lunghi sierare e conservare -20 °C. Congelare una sola volta.
Etanolo plasmatico (alcol etilico, alcolemia)	90.20.1_2 1211	Enzimatico/alcool deidrogenasi Cobas 502 Roche CV%: 10	Plasma, verde chiaro litio eparina. Plasma, verde scuro urgenze.			
Etanolo urinario	90.20.1_3 1213	deidrogenasi Cobas 502 Roche CV%: 10	Urina campione estemporaneo, vasetto sterile giallo con dispositivo per successiva aspirazione. Acquisibile presso farmacie. Vedi per modalità di richiesta Benzodiazepine screening	1		
Etilglucuronato (ETG, Etilglucuronide)	90.40.9_30 new7199		Urina campione estemporaneo, vasetto sterile giallo con dispositivo per successiva aspirazione. Acquisibile presso farmacie.	7	Padova	Conservare 2 giorni a 2-8°C.
Etosuccimide	90.17.B_7 new1215		Siero, Giallo	22	Mestre	Sierare e conservare 2-8°C.
Everolimus	90.17.B_28 new7401		Sangue intero, lilla K2 EDTA	22	Padova	Conservare 7 giorni a 2-8°C tal quale. Per tempi più lunghi conservare a -20°C.
Fattore II Protrombina (mutazione G20210A) Nota al prescrittore: richiedere sempre insieme a V Leiden	G1.91_4 new1124ii	Biologia molecolare PCR Real Time/ GeneXpert/ Cephaid	Sangue intero, lilla K2EDTA.Contestual mente è eseguito anche il Fattore V Leiden. Fase analitica: UOSD Microbiologia. Validazione clinica e firma UOC Medicina di Laboratorio	20		
Fattore V Leiden (mutazione G1691A) (Mutazioni trombofilia) Nota al prescrittore: richiedere sempre insieme a II mutazione Protrombina	G1.91_3 new1124v	Biologia molecolare, PCR Real Time/ GeneXpert/ Cephaid	Sangue intero, lilla K2EDTA Contestualmente è eseguito anche fattore II Protrombina mutazione 20210. Fase analitica: UOSD Microbiologia. Validazione clinica e firma: UOC Medicina di Laboratorio	20		
Fattore VIII Eseguibile solo presso UO e Centri Prelievi Ospedalieri	90.64.3_5 1191		Plasma, celeste, sodio citrato. 2 Provette.	24	Mestre	Doppia centrifugazione, sierare e conservare

 REGIONE DEL VENETO ULSS5 POLESANA UOC Medicina di Laboratorio	CATALOGO PRESTAZIONI UOC MEDICINA DI LABORATORIO (CPL)	DV/MLAB/09 Rev. 7 Pag. 19/38
--	--	---

dal lunedì al venerdì			Consegna entro 4 ore dal prelievo			a – 20°C.
Fattore Reumatoide (RF, Reuma test, Waaler Rose reazione)	90.64.2_0 503	Immunoturbidimetria CV%: 1.7	Plasma, verde chiaro litio eparina	1		
Fenitoina (difenilidantoina)	90.17.C_32 new1235	KIMS: Interazione cinetica di microparticelle in soluzione. Cobas 502 Roche CV%: 10	Plasma, verde chiaro litio eparina.	2		
Fenobarbital	90.17.C_42 new1237	KIMS: Interazione cinetica di microparticelle in soluzione. Cobas 502 Roche CV%:10	Plasma, verde chiaro litio eparina	2		
Ferritina	90.22.3_0 709	ECLIA Elettrochemiluminescenza. Cobas 602 Roche. CV%: 8	Plasma, verde chiaro litio eparina	2		
Ferro (sideremia)	90.22.5_2 new237	Ferrozina/ Cobas Roche CV%: 1.5	Plasma, verde litio eparina routine	1		
Fibrinogeno	90.64.6_0 new1105	Coagulativa-Clauss/ STAR Evolution STAGO. CV%: 5	Plasma, celeste, sodio citrato. Consegna entro 4 ore dal prelievo.	1		
Folato. (Acido Folico)	90.23.2_2 713	ECLIA Elettrochemiluminescenza. Cobas 602 Roche. CV%: 15	Plasma, verde chiaro litio eparina	2		
Fosfatasi alcalina (ALP).	90.23.5_0 301	Nitrofenilfosfato/ Cobas Roche CV%: 1.5	Plasma, verde chiaro litio eparina	1		
Fosfatasi Alcalina isoenzima osseo (isofosfatasi)	90.24.1_0 303	CV%: 20	Siero, marrone	20	Padova	Conservare 2 giorni a 2-8 °C. Per tempi più lunghi sierare e conservare a -70 °C
Fosfato inorganico (fosfemia fosforo, P)	90.24.3_2 229	ammonio molibdato/ Cobas Roche CV%: 1.4	Plasma, verde chiaro litio eparina. In caso di richiesta di fosforo va accettato fosfato o quello che è esente per il paziente con esenzione per patologia.	1		
Fosfato inorganico urinario (fosfaturia).	90.24.3_4 422	ammonio molibdato/ Cobas Roche CV%: 1.7	Urina 24 ore, contenitore senza conservati acquisibile presso farmacie. Mantenere in luogo fresco durante la raccolta.	1		
FSH (ormone follicolo stimolante, follitropina)	90.23.3_2 719	ECLIA Elettrochemiluminescenza. Cobas 601 Roche. Trecenta. CV%: 10	Siero, blu	3		Conservare 14 giorni a 2-8 °C. Per tempi più lunghi sierare e conservare -20 °C Congelare solo 1 volta.
FT3 (Triiodotironina frazione libera)	90.43.3_0 701	ECLIA Elettrochemiluminescenza. Cobas 602 Roche CV%: 8	Plasma, verde chiaro litio eparina	2		

 REGIONE DEL VENETO ULSS5 POLESANA UOC Medicina di Laboratorio	CATALOGO PRESTAZIONI UOC MEDICINA DI LABORATORIO (CPL)	DV/MLAB/09 Rev. 7 Pag. 20/38
--	---	---

FT4 (Tiroxina frazione libera)	90.42.3_0 703	ECLIA Elettrochemiluminescenza. Cobas 602 Roche CV%: 8	Plasma, verde chiaro litio eparina	2		
Gastrina Eseguibile solo presso UO e Centri Prelievi Ospedalieri.	90.26.1_2 7307		Siero, marrone	14	Mestre	Entro 2 ore dal prelievo Centrifugare, aliquotare e conservare a – 20°C
Gamma GT (gammaglutamiltranspeptidasi)	90.25.5_2 299	IFCC/ Cobas Roche CV% : 1.9	Plasma, verde chiaro litio eparina	1		
GH (hGH, ormone somatotropo)	90.35.1_2 7007	ECLIA Elettrochemiluminescenza. Cobas 601 Roche, Adria CV%: 10	Siero, marrone.	6		Conservare il siero: 8 ore a temperatura ambiente; 2-8 °C fino a 48 ore; -20 °C per 28 giorni (congelare una sola volta)
GH (hGH) ormone somatotropo curva dopo stimolazione ai minuti 0,60,120, salvo diversa indicazione del prescrittore. Eseguibile solo presso UO e Centri Prelievi Ospedalieri. Il Centro Prelievi di Rovigo assicura solo lo stimolo con soluzione 75 g di glucosio	I prelievo: vedi GH II prelievo 90.35.1_3 new7007ii III prelievo 90.35.1_4 new7007iii	ECLIA Elettrochemiluminescenza. Cobas 601 Roche, Adria	Siero, marrone.	6		
GH (hGH, ormone somatotropo curva dopo stimolazione 0,30,60,90,120) Eseguibile solo presso UO e Centri Prelievi Ospedalieri. Il Centro Prelievi di Rovigo assicura solo lo stimolo con soluzione 75 g di glucosio	90.35.2_5 7010	ECLIA Elettrochemiluminescenza. Cobas 601 Roche, Adria	Siero, marrone.	6		
Glucagone	90.26.3_0 7345		Plasma, lilla K2EDTA. Conservare campione refrigerato	22	Padova	Sierare e conservare 24 ore a 2-8 °C Per tempi più lunghi , sierare e conservare a – 20 °C.
Glucosio (glicemia) Glucosio su liquor: vedi Liquor	90.27.1_2 201 201d: per distretti	Esocinasi. Cobas 702 Roche CV%: 1.2	Plasma, verde chiaro litio eparina routine, verde scuro litio eparina urgenze. Consegna entro 2 ore dal prelievo Grigia, fluoruro di sodio (NaF) + K3EDTA (inibitore glicolisi) nei distretti e Case di Riposo. Consegna entro 4 ore dal prelievo .	1		
Glucosio POCT	90.27.1_2 201p	Esocinasi Piccolo De Mori	Plasma, Verde scuro litio eparina urgenze			
Glucosio curva dopo carico (OGTT). Adulti/bambini. 2 prelievi: base, 120 Gravidanza.	90.26.5_0 new202	esocinasi/ Cobas Roche. CV%: 1.2	Plasma, grigia fluoruro di sodio (NaF) + K3EDTA (inibitore glicolisi)	1		

REGIONE DEL VENETO  ULSS5 POLESANA UOC Medicina di Laboratorio	CATALOGO PRESTAZIONI UOC MEDICINA DI LABORATORIO (CPL)	DV/MLAB/09 Rev. 7 Pag. 21/38
---	--	---

3 prelievi: base, 60,120 Eseguibile solo presso UO e Centri Prelievi Ospedalieri. Nota al prescrittore: deve essere indicato se l'utente è in gravidanza.					
Glucosio postprandiale (dopo due ore dal pasto). Eseguibile solo presso UO e Centri Prelievi Ospedalieri.	90.27.1_6 203	esochinasi/ Cobas Roche. CV%: 1.2	Plasma, verde chiaro litio eparina	1	
Glucosio 6 fosfato deidrogenasi (G6PDH)	90.27.2_0 321		Sangue intero, verde scuro, litio eparina.	15	Padova Conservare 15 giorni la provetta, tal quale, a 2- 8°C
Gonadotropina corionica (beta HCG)	90.27.5_2 715	ECLIA Elettrochemiluminescenza. Cobas Roche. CV%: 10	Plasma, verde chiaro litio eparina. Plasma, verde scuro litio eparina urgenze.	1	
Gruppo sanguigno ABO e Rh (Agglutinogeni e Agglutinine)	90.65.3_2 7801		Sangue intero, viola, K2EDTA. Test di competenza UOC Medicina Trasfusionale		
Fenotipo Rh HFE (genetica Emocromatosi)	% TAB 90.64.4_0 G1.0210_2 7908		Sangue intero, lilla K2EDTA. Test di competenza UOC Medicina Trasfusionale		
HIV anticorpi Virus Immunodeficienza Acquisita (HIV 1-2) anticorpi e antigene p24 Richiedibile in urgenza da UO e PS solo per: a) incidenti occupazionali b) espanto d'organi c) madri partorienti con stato sierologico non noto d) violenza sessuale	7847A	ECLIA Elettrochemiluminescenza. Cobas 801 Roche.	Plasma, lilla, K2EDTA		
Idrossiprogesterone (17 alfa idrossiprogesterone, 17 OH-P)	90.01.2_0 7319		Siero, marrone	10	Mestre Conservare a 2- 8°C
IgA, IgG, IgM (immunoglobuline)	90.69.4 500 IgA 90.69.4_7 537 IgG 90.69.4_6 533 IgM 90.69.4_5 535	Immunoturbidimetrico Cobas 502 Roche CV%: 2	Plasma, verde chiaro litio eparina	2	
IgG urine	90.69.4_3 626	Immunoturbidimetrico Cobas 502 Roche CV%: 2.7	Urine 24 ore, contenitore senza conservanti acquisibile presso farmacie. Mantenere possibilmente in luogo fresco	2	
IgE totali (PRIST)	90.68.3_0 771	ECLIA Elettrochemiluminescenza. Cobas 601 Roche .Adria. CV%: 8	Siero, marrone	2	Conservare 7 giorni a 2-8°C. Per tempi più lunghi sierare e conservare a -20°C.
IgE specifiche.		Immunofluorimetria/	Siero, marrone	20	Conservare

 REGIONE DEL VENETO ULSS5 POLESANA UOC Medicina di Laboratorio	CATALOGO PRESTAZIONI UOC MEDICINA DI LABORATORIO (CPL)	DV/MLAB/09 Rev. 7 Pag. 22/38
--	---	---

(RAST) Nell' ULSS 5 sono previsti 5 pannelli con allergeni predefiniti (vedi sotto). In caso di pannello predefinito è necessario: per il codice 90.68.B_0 specificare se è pannello alimenti o inalanti; per il codice 90.68.C_0 specificare se è pannello farmaci o imenotteri Se non si intende utilizzare un pannello predefinito i codici regionali 90.68.B_0 e 90.68.C_0 possono essere utilizzati anche come "pannelli aperti" i quali possono contenere fino a 12 allergeni. Qualora si vogliano richiedere singoli allergeni, senza utilizzare i pannelli predefiniti o aperti, essi valgono 1 esame e possono esserne prescritti max. 8 per impegnativa. I codici dei singoli allergeni sono elencati in coda a questo documento. 1. Pannello alimenti 1 RO (bambini <6 mesi): f1 albume f233 Gal d1 (Ovomucoide) f76 Bos d4 (alfa- lattoalbumina) f77 Bos d5 (beta - Lattoglobulina) f78 Bos d8 (caseina) f3 pesce (merluzzo) f4 Grano f14 soia f17 nocciola 2. Pannello alimenti 2 RO (adulti e bambini > 6 mesi): f1 albume f2 latte f3 pesce f4 grano f13 arachidi f14 soia f24 gambero f439 Cor a 14 (Nocciola) f440 Cor a 9 (nocciola) f419 Pru p1 (Rosaceae) f420 Pru p3 (Rosaceae) f421 Pru p4 (Profilina) 3. Pannello inalanti RO (bambini ed adulti): g205 phl p1 (Graminaceae) g215 phl p5b (Graminaceae) t215 bet v1 (Betullaceae) t216 bet v2 (Profilina) t224 Ole e1 (Oleaceae)	Pannello alimenti 1 90.68.B_0 760a Pannello alimenti 2 90.68.B_0 762a Pannello inalanti 90.68.B_0 764a Pannello farmaci 90.68.C_0 766 Pannello imenotteri 90.68.C_0 770 Nota per l'amministrativo: Qualora il medico richieda un pannello alimenti o inalanti con allergeni diversi da quelli predefiniti in ULSS 5, l'amministrativo cambia l'allergene inserendo quelli prescritti, naturalmente fino al massimo di 12 per pannello.	ImmunoCAP 250 Phadia Adria CV%: 15				a 2-8°C.
---	--	---	--	--	--	-----------------

REGIONE DEL VENETO  ULSS5 POLESANA UOC Medicina di Laboratorio	CATALOGO PRESTAZIONI UOC MEDICINA DI LABORATORIO (CPL)	DV/MLAB/09 Rev. 7 Pag. 23/38
---	--	---

w231 Art v1 (artemisia-Assenzio) w211 Par j 2 (parietaria) d1 Dermatophagoides pteronyssus d2 Dermatophagoides farinae e1 Eptelio di gatto e5 eptelio di cane m6 alternaria 4. Pannello Farmaci RO c1 Penicilloyl G c2 Penicilloyl V c5 Ampicillina c6 Amoxicillina c202 Succinilcolina c7 Cefaclor 5. Pannello Imenotteri RO i1 Ape i3 Vespa (Vespula spp) (Giallone) i4 Polistes spp (Vespa) i77 Polistes dominulus (vespa europea) i75 Calabrone (Vespa cabro) i205 Bombo i208 Api m1 i217 Api m10 i211 Ves v1 i209 Ves v5 i210 Pol d5 Ro214 MUXF3 CCD bromelina					
Immunofissazione (tipizzazione Componenti Monoclonali -CM). Nota: la tipizzazione delle CM può essere eseguita con tecnica di immunosottrazione o immunofissazione. Il test comprende elettroforesi delle proteine e determinazione delle proteine totali.	90.69.2_2 new543	Capillare (immunosottrazione) Gel di agarosio/ Hydragel/Sebia (immunofissazione) La tecnica è decisa dal laboratorio in base alla tipologia del picco monoclonale.	Siero, giallo	8	
Immunoglobuline Kappa e Lambda. Catene leggere kappa e lambda. Nota al prescrittore: i due codici devono essere prescritti insieme	90.28.7_4 90.28.7_5 new614	Immunoturbidimetria. Optilite/Binding Site	Urina 24 ore, contenitore senza conservati acquisibile presso farmacie. Mantenere in luogo fresco durante la raccolta.	6	
Immunofenotipizzazione leuco/infocitaria. Fino a 8 antigeni Pannello antigeni: CD3, CD4, CD8, CD16-56, CD19. Su disposizione del Centro Trasfusionale i prelievi sono eseguiti solo presso Centri Prelievi Ospedalieri dal lunedì al venerdì e UO; per altri antigeni al di fuori di quelli elencati rivolgersi presso centri universitari (Es. Padova, Verona, Ferrara).	91.47.C_2 7812		Sangue intero, lilla K2 EDTA, provetta da emocromo. Test di competenza UOC Medicina Trasfusionale	3	Conservare 24 ore a temperatura ambiente. I campioni del venerdì pomeriggio e dei giorni prefestivi devono arrivare in Centro Trasfusionale entro le ore 13.00.
Insulina (basale)	90.29.1_2 7021	ECLIA Elettrochemiluminesce	Siero, marrone.	8	Conservare 48 ore a 2-8 °C. Per tempi

 REGIONE DEL VENETO ULSS5 POLESANA UOC Medicina di Laboratorio	CATALOGO PRESTAZIONI UOC MEDICINA DI LABORATORIO (CPL)	DV/MLAB/09 Rev. 7 Pag. 24/38
--	--	---

		nza. Cobas 601 Roche. Adria. CV%: 12				più lunghi sierare e conservare a – 20 °C.
Insulina (curva dopo carico di glucosio: base e 120). Eseguibile solo presso i centri prelievi ospedalieri e UO.	90.28.5_3 7024	ECLIA Elettrochemiluminescenza. Cobas 601 Roche.Adria. CV%: 12	Siero, marrone. Per curve con richieste di prelievi con altro schema orario, l'utente è indirizzato al servizio di Malattie Metaboliche per accettazione (cod. 7024 protratta) ed esecuzione prelievo.	8		Conservare 48 ore a 2-8 °C. Per tempi più lunghi sierare e conservare a – 20 °C.
Ioduria	90.27.6_0 7225		Urina, campione estemporaneo, vasetto sterile con dispositivo per successiva aspirazione. Acquisibile presso farmacie.	30	Padova Semeiotica	
Istamina	90.42.B_3 new7351		Plasma, lilla K2 EDTA	37	Padova	Sierare e conservare a --20°C
JAK 2 mutazione Esecuzione prelievo solo presso Centri Prelievi Ospedalieri e UO Ospedalieri dal lunedì a giovedì. Attenzione: test non scaricabile on line. Ritiro presso Centri Consegna Referti.	G1.91_15 new230 Vedi nota amministrativi BCR/ABL qualitativo.		Sangue intero, lilla, 4 provette K2EDTA. Conservazione campione refrigerato.	40	IOV	Conservare 24 ore campione tal quale a 2-8 C°
LAC (lupus anticoagulant) Lac (Anticoagulante Lupus-Like)	90.46.5_2 90.46.5_3 1121	Viscosimetrico dRVVT SCT /Sta Compact Max 3/STAGO. Adria	Plasma, celeste, Sodio citrato, 2 provette. Consegna entro 4 ore dal prelievo	15		Doppia centrifugazione . Sierare e conservare a – 20 °C. Vedi PO/MLAB/06
Lamotrigina LEA solo per residenti Regione Veneto. Per Utenti extra Veneto accettabile come Privati Paganti.	90.17.B_33 new7361		Siero, giallo	22	Mestre	Conservare a 2-8°C.
Lattato deidrogenasi (LDH)	90.29.2_2 297	IFCC (Lattato Piruvato) / Cobas Roche CV%: 1.9	Plasma, verde chiaro litio eparina	1		
Levetiracetam LEA solo per residenti Regione Veneto. Per Utenti extra Veneto accettabile come Privati Paganti.	90.17.B_40 new7369		Siero, giallo	17	Mestre	Conservare a 2-8°C.
LH (ormone luteostimolante, luteotropina)	90.32.3_2 new721	ECLIA Elettrochemiluminescenza. Cobas 601 Roche.Trecenta CV%: 8	Siero, blu	3		Conservare per 14 giorni a 2-8°C.
Lipasi	90.30.2_2 309	Substrato trigliceride/acido glutarico-metilresorufina/ Cobas 502 Roche CV%: 1.6	Plasma, verde chiaro, litio eparina	1		
Lipoproteina (a)	90.30.3_0		Siero, rosa	10	Padova	Sierare e conservare

 REGIONE DEL VENETO ULSS5 POLESANA UOC Medicina di Laboratorio	CATALOGO PRESTAZIONI UOC MEDICINA DI LABORATORIO (CPL)	DV/MLAB/09 Rev. 7 Pag. 25/38
--	---	---

	527					6 giorni a 2-8 °C. Per tempi più lunghi sierare e conservare a – 20 °C.
Liquido articolare/sinoviale : aspetto, colore, pH, densità, coagulazione, proteine totali, cristalli. . Leucociti, eritrociti. Richiedibile solo dal lunedì al giovedì	90.32.1_0 691		Liquido articolare. N. 2 provetta tappo bianco senza additivi da 4 mL e provetta lilla K2 EDTA	7	Padova	Conservare 1 giorno provette tal quali a 2-8 °C.
Liquido di dialisi peritoneale: glucosio, urea, creatinina, albumina. Leucociti	90.30.4_6 2009	Vedi singoli test	Liquido di dialisi. Provetta tappo bianco senza additivi da 4 mL e provetta lilla K2 EDTA.	2		
Liquido pericardico: Aspetto, colore, pH, proteine totali, LDH. Leucociti	90.30.4_10 2007	vedi singoli test	Liquido pericardico. Provetta tappo bianco senza additivi da 4 mL e provetta lilla K2 EDTA	2		
Liquido peritoneale: aspetto, colore, pH, proteine totali, LDH Leucociti	90.30.4_11 2009	vedi singoli test	Liquido peritoneale. Provetta tappo bianco senza additivi da 4 mL e provetta lilla K2 EDTA	2		
Liquido pleurico: aspetto, colore, pH, proteine totali , LDH. Leucociti	90.30.4_12 2011	vedi singoli test	Liquido pleurico. Provetta tappo bianco senza additivi da 4 mL e provetta lilla K2 EDTA	2		
Liquido seminale (spermiogramma), esame macroscopico e microscopico.	90.31.6_0 1515		Liquido seminale, contenitore sterile tipo urinocultura acquisibile presso farmacie. Raccolta a domicilio. Mantenere a temperatura corporea. Consegnare nel minor tempo possibile (max. 1 ora dalla raccolta) presso Centro PMA di Trecenta su appuntamento al n. 800061644 Test di competenza UOC Ginecologia Ostetricia, PMA.	6	Centro Procreazione Medicalment e Assistita (PMA) di Trecenta UOC Ginecologia e Ostetricia	
Liquido seminale, capacitazione dl materiale seminale (Swim up)	69.92.1_0 1525		Liquido seminale, contenitore sterile tipo urinocultura acquisibile presso farmacie. Raccolta a domicilio. Mantenere a temperatura corporea. Consegnare nel minor tempo possibile (max. 1 ora dalla raccolta) presso Centro PMA di Trecenta su appuntamento al n. 800061644. Test di competenza	6	Centro Procreazione Medicalment e Assistita (PMA) di Trecenta UOC Ginecologia e Ostetricia	

 REGIONE DEL VENETO ULSS5 POLESANA UOC Medicina di Laboratorio	CATALOGO PRESTAZIONI UOC MEDICINA DI LABORATORIO (CPL)	DV/MLAB/09 Rev. 7 Pag. 26/38
--	--	---

			UOC Ginecologia Ostetricia, PMA.			
Liquor chimico fisico e microscopico (aspetto, torbidità proteine, glucosio, leucociti, acido lattico).	90.30.4_4 1331	Vedi singoli test. Per leucociti: lettura automatizzata Sysmex XN o microscopia ottica.	Liquor, provetta tappo bianco senza additivi da 4 mL. Disponibile solo in urgenza per i ricoverati e PS. Nota: il test Beta Trace Protein, eseguito a Padova, è utile nell'ipotesi di fistola liquorale per distinguere una rinorrea liquorale da secrezione nasale.			
Litio	90.32.2_0 1221	Immunoenzimatico spettrofotometrico/ Cobas 502 Roche. CV%: 5	Siero, rosso	1		
LUE Screening / Sifilide Richiedibile in urgenza solo per espianto	7631A	ECLIA Elettrochemiluminescenza. Cobas Roche. Rovigo	Plasma, lilla K2 EDTA			
Magnesio totale	90.32.5_2 231	blu di xilinile/ Cobas Roche 502 CV% : 1.1	Plasma, verde chiaro litio eparina	1		
Magnesio totale urinario	90.32.5_5 426	blu di xilinile/ Cobas Roche 502 CV% : 1.3	Urina 24 ore, contenitore senza conservati acquisibile presso farmacie. Mantenere campione refrigerato durante la raccolta	1		
Malaria	1051	Immunocromatografico BinaxNow Malaria	Sangue intero, lilla K2EDTA.			
Metadone (screening) Droghe d'abuso	90.40.9_25 new1259	KIMS: Interazione cinetica di microparticelle in soluzione. Cobas 502 Roche CV%: 3	Urina estemporanea, vasetto sterile giallo. Vedi per modalità di richiesta Benzodiazepine screening	2		
Metanefrine urinarie (Metanefrina Normetanefrina) Nota al prescrittore: è consigliato prescrivere entrambe le prestazioni.	Metanefrina 90.33.6_2 Normetanefrina 90.33.6_4 new7216		Urina 24 ore, contenitore con conservante HCL 10mL ritirabile presso centri prelievi ospedalieri. Mantenere refrigerato durante la raccolta. Nelle 12 ore precedenti la raccolta evitare esercizio fisico intenso, fumo, pasto iperproteico e caffeina, alcolici, banana, cacao, agrumi, ananas, vaniglia, noci.	28	Mestre	Conservare a 2-8 °C
Methotrexate, Metotrexato	90.17.C_43 new1249		Siero, rosa	5	Mestre	Centrifugare , aliquotare e conservare a -20°C
Mioglobina	90.33.5_2 281	.	Plasma. Verde scuro piccolo litio/eparina	3	Padova	Sierare e conservare 8 giorni a 2-8 °C Per tempi più lunghi

REGIONE DEL VENETO  ULSS5 POLESANA UOC Medicina di Laboratorio	CATALOGO PRESTAZIONI UOC MEDICINA DI LABORATORIO (CPL)	DV/MLAB/09 Rev. 7 Pag. 27/38
---	--	---

						A - -20°C
NSE (Enolasi Neurone Specifica)	90.18.4_0 7301		Siero, marrone	11	Mestre	Centrifugare e conservare a 2-8°C.
Omocisteina	90.34.6_0 7343	Immunoenzimatico spettrofotometrico/ Cobas 702 Roche. CV%: 2	Siero, marrone. Campione refrigerato	2		Centrifugazione e separazione del siero entro un ora dal prelievo. Esecuzione analitica entro 4 settimane conservato a 2-8 °C.
Prelievo eseguito solo presso Centri Prelievi Ospedalieri e UO						
Oppiacei, Morfina (screening, dosaggio qualitativo)	90.40.9_21 new1261	KIMS: Interazione cinetica di microparticelle in soluzione. Cobas 502 Roche CV%: 3.9	Urina estemporanea, vasetto sterile giallo. Vedi per modalità di richiesta Benzodiazepine screening	2		Conservare 5 giorni a 2- 8 °C. Per tempi più lunghi conservare a – 20 C°.
Osmolalità plasmatica diretta	90.34.7_2 271	Abbassamento del punto di congelamento/ Osmo Pro/ De Mori CV%: 5	Plasma, verde chiaro litio eparina, verde scuro litio eparina urgenze	1		
Osmolalità plasmatica calcolata (solo in urgenza Adria e Trecenta)	279	Adria e Trecenta, in urgenza, calcolata. Cobas/Roche				
Osmolalità urinaria	90.34.7_3 1301	Abbassamento del punto di congelamento/Osmo Pro/ De Mori CV%: 5	Urina campione estemporaneo, vasetto sterile con dispositivo per successiva aspirazione. Acquisibile presso farmacie.	1		
Osteocalcina (BGP)	90.35.4_2 new7003		Siero, blu elettrico	10	Padova	Conservare 3 giorni a 2-8 °C, per tempi più lunghi sierare e conservare a -20°C
Ossalati (Ossalato, Acido ossalico)	90.35.3_0 444		Urina 24 ore, contenitore con HCl 10 mL ritirabile presso i centri prelievi ospedalieri. Evitare da due giorni precedenti e per tutto il tempo della raccolta cibi ricchi in ossalati come cipolle, fragole, pomodori, prezzemolo, rabarbaro e spinaci.	18	Mestre	Conservare a 2-8 °C
Paratormone (PTH) intatto	90.35.5_2 new7001	ECLIA Elettrochemiluminescenza. Cobas Roche. CV%: 2.1	Plasma, lilla K2 EDTA.	2		Conservare 1 giorno provetta tal quale a temperatura ambiente
Peptide natriuretico Cerebrale (NT- Pro BNP)	90.36.6_0 287	ECLIA Elettrochemiluminescenza. Cobas Roche.	Plasma, verde chiaro litio eparina.	1		
Piastrine in citrato	90.62.2_3 1003c	Impedenziometrico/Ottico/Fluorescenza. Sysmex XN Dasit CV%: 2.5	Sangue intero, celeste, sodio citrato, Consegna entro 4 ore dal prelievo.	1		
Nota al prescrittore:è' opportuno richiedere anche emocromo.						
Piombo ematico	90.36.3_2 7367		Plasma, verde scuro, litio eparina.	13	Padova Tossicologia	Conservare a 2-8 °C senza previa

 REGIONE DEL VENETO ULSS5 POLESANA UOC Medicina di Laboratorio	CATALOGO PRESTAZIONI UOC MEDICINA DI LABORATORIO (CPL)	DV/MLAB/09 Rev. 7 Pag. 28/38
--	--	---

			Conservare campione refrigerato		Industriale	centrifugazione
Piombo urinario	90.36.3_3 7227		Urine raccolta 24 ore, contenitore senza conservanti acquisibile presso farmacie. Conservare a -20°C		Padova Tossicologia Industriale	Conservare a -20°C
Polipeptide pancreatico	90.36.5_3 7349		Siero, blu elettrico. Campione refrigerato	37	Padova	Sierare e conservare a -20°C
Porfirine totali (sono eseguiti anche in automatico uroporfirine 90.37.1_3 e le coproporfirine 90.14.5_0)	90.37.1_2 443		Urina 24 ore, contenitore con carbonato di sodio, ritirabile presso centri prelievi ospedalieri. Tenere campione refrigerato, al buio protezione con carta stagnola	17	Padova	Conservare al buio a -20°C.
Potassio	90.37.4_2 223	ISE indiretto/ Cobas ISE Roche CV%: 2	Plasma, verde chiaro, litio eparina, Verde scuro litio eparina urgenze. Consegna entro 4 ore dal prelievo	1		
Potassio POCT	90.37.4_2 223p	Spettrofotometrico. Piruvato chinasi e LDH/ Piccolo De Mori	Plasma, verde scuro litio eparina			
Potassio urinario (Kaliuria)	90.37.4_3 410	ISE indiretto/ Cobas Roche CV%: 5	Urina 24 ore, contenitore senza conservanti acquisibile presso farmacie. Mantenere possibilmente in luogo fresco durante la raccolta	1		
Prealbumina (PALB, Transtiretina)	90.37.6_2 515	Immunoturbidimetrico Cobas 502 Roche CV%: 8	Plasma, verde chiaro litio eparina	2		
Procalcitonina Richiedibile solo in urgenza per ricoverati e PS.	90.38.Z_0 795	ECLIA Elettrochemiluminescenza. Cobas Roche. Reagente: Thermofisher	Plasma, verde chiaro litio eparina.			
Progesterone	90.38.1_0 725	ECLIA Elettrochemiluminescenza. Cobas 601 Roche. Trecenta CV%: 10	Siero, blu	3		Conservare 5 giorni a 2-8 °C.
Prolattina (HPRL)	90.38.2_2 727	ECLIA Elettrochemiluminescenza. Cobas 601 Roche.Trecenta CV%: 8	Siero, blu.	3		Sierare e conservare 14 giorni.
Prolattina seriata (HPRL). Eseguibile solo nei Centri Prelievi Ospedalieri e UO con mantenimento di unico accesso venoso tramite applicazione di soluzione fisiologica per i due punti seriali successivi. Eseguita tempistica 0 (basale)	I prelievo: vedi prolattina II prelievo 90.38.2_3 new728ii III prelievo 90.38.2_4 new728iii	ECLIA Elettrochemiluminescenza. Cobas 601 Roche.Trecenta	Siero, blu prolattina, 3 campioni.	3		Sierare e conservare 14 giorni

 REGIONE DEL VENETO ULSS5 POLESANA UOC Medicina di Laboratorio	CATALOGO PRESTAZIONI UOC MEDICINA DI LABORATORIO (CPL)	DV/MLAB/09 Rev. 7 Pag. 29/38
--	--	---

15, 30 minuti salvo diversa indicazione del prescrittore.						
Proteina cationica degli eosinofili (ECP) Prelievo eseguito solo presso Centri Prelievi Ospedalieri e UO per necessità di processazione del campione.	90,68,6_0 new7339		Siero, rosa.	16	Mestre	Sierare tra la seconda e terza ora dal prelievo e conservare a - 20°C
Proteina C anticoagulante funzionale	90.72.2_0 1113	Cromogenica / STAR Evolution STAGO CV%: 4	Plasma, celeste, sodio citrato Consegna entro 4 ore dal prelievo	2		
Proteina C Reattiva (PCR)	90.72.3_2 573	immunoturbidimetria/ Cobas 702 Roche CV%: 2.1	Plasma, verde chiaro litio eparina, Verde scuro litio eparina urgenze	1		
Proteina C Reattiva (PCR) POCT	90.72.3_2 573p	Immunodosaggio al lattice. Piccolo/De Mori	Verde scuro litio eparina			
Proteina S free (libera) anticoagulante	90.72.4_0 1115	Immunoturbidimetria (espressa come % di presenza) / STAR Evolution STAGO CV%: 4	Plasma, celeste, sodio citrato Consegna entro 4 ore dal prelievo	2		
Proteine totali Proteine totali su liquor: vedi liquor	90.38.5_2 209	Colorimetrico, Biureto modificato/ Cobas 702 Roche CV%: 2.1	Plasma, verde chiaro litio eparina, Verde scuro litio eparina urgenze	1		
Proteine totali urine (Proteinuria)	90.38.5_4 600	Turbidimetrico con Benzetonio cloruro/ Cobas 702 Roche CV%: 1.3	Urina 24 ore, contenitore senza conservati acquisibile presso farmacie. Mantenere refrigerato il campione durante la raccolta	1		
Protoporfirina IX eritrocitaria	90.39.2_0 7395		Siero, blu	10	Padova	
PSA Reflex (Antigene prostatico specifico) cut-off $\geq 2,5 - \geq 10,0 \mu\text{g/L}$. Incluso: esecuzione automatica di fPSA, referto di PSA + fPSA con calcolo del rapporto fPSA/PSA se PSA > 2,5 e < 10,0.	90.56.9_0 new724	ECLIA Elettrochemiluminescenza. Cobas 602 Roche. CV%: 8	Plasma, verde chiaro litio eparina	1		
Rame (cupremia)	90.39.4_2 233		Siero, giallo	10	Mestre	Sierare e conservare a -20 °C
Recettore solubile della transferrina (TfR)	90.39.6_0 7373		Siero, marrone	7	Padova	Sierare e conservare 6 giorni a 2-8 °C. Per tempi più lunghi sierare e conservare a -20°C
Renina La richiesta abbinata di basale e clinostatismo è eseguita solo presso UO e Centri Prelievi Ospedalieri. Non è possibile eseguire solo prelievo in clinostatismo	90.40.2_3 basale/ ortostatismo 755 90.40.2_2 clinostatismo 757	Immunochemiluminescenza/Maglumi Medical Systems CV%: 6	Plasma, viola grande K3EDTA Abbinata clino e ortostatismo: il primo prelievo, in clinostatismo, è effettuato all'utente sdraiato da almeno 45 minuti. L'utente è invitato poi a passeggiare in modo ininterrotto per 45 minuti. Effettuare	15		Sierare e conservare a -20°C.

REGIONE DEL VENETO  UOC Medicina di Laboratorio	CATALOGO PRESTAZIONI UOC MEDICINA DI LABORATORIO (CPL)	DV/MLAB/09 Rev. 7 Pag. 30/38
--	--	---

			immediatamente il prelievo in ortostatismo (da seduto). Procedura condivisa con Ambulatorio Ipertensione ULSS 5.			
Resistenza alla Proteina C Attivata (APCR)	90.77.2_0 1193	Viscosimetrico/ Sta Compact Max 3/STAGO Adria	Plasma, celeste sodio citrato. 2 Provette. Consegna entro 4 ore dal prelievo	15		Doppia centrifugazione . Sierare e conservare a - 20 °C.
Reticolociti	90.74.5_0 1011	Citometria a flusso in fluorescenza/Sysmex XN	Sangue intero, lilla K2EDTA	1		
Rivaroxaban Disponibile solo in urgenza per i ricoverati e PS. Eseguito solo a Rovigo.	90.63.1_5 new1137	Cromogenico anti X attivato/ STAR R Max 3 STAGO	Plasma, celeste sodio citrato Consegna entro 4 ore dal prelievo			
Sangue occulto nelle feci	90.21.4_2 8001 (1° campione) 90.21.4_3 8002 (2° campione) 90.21.4_4 8003 (3° campione)	Immunologico al lattice turbidimetrico (Trecenta) /Diana/Medical Systems	Feci, contenitore dedicato per sangue occulto con liquido di conservazione (Il contenitore è disponibile, negli orari di apertura, presso i Centri Prelievo). In caso di raccolta di 3 campioni, devono essere consegnati contemporaneamente e. Le 3 raccolte possono essere anche dello stesso giorno. Campioni conservati per massimo 7 giorni in frigorifero.	4		
Sangue occulto screening CCR	Codice legato alla programmazione regionale	Immunologico al lattice turbidimetrico /Diana/Medical Systems. Trecenta	Feci. Contenitore dedicato per sangue occulto con liquido di conservazione fornito dalla farmacie su invito della programma regionale dello screening CCR. Campione conservato per massimo 7 giorni in frigorifero.			
Serotonina urine (5-idrossitriptamina, 5- HT)	90.03.6_11 new7204		Urina 24 ore, contenitore senza conservanti. Acquisibile presso farmacie.	22	Padova	Conservare a -20°C
SHBG (globulina da trasporto ormoni sessuali)	90.25.7_0 7365		Siero, marrone	10	Mestre	Sierare e conservare a 2-8 °C.
Sirolimus (Rapamicina)	90.17.B_27 new7393		Sangue intero, lilla K2 EDTA Conservare il campione refrigerato.	10	Padova	Sierare e conservare 7 giorni a 2-8°C.

 REGIONE DEL VENETO ULSS5 POLESANA UOC Medicina di Laboratorio	CATALOGO PRESTAZIONI UOC MEDICINA DI LABORATORIO (CPL)	DV/MLAB/09 Rev. 7 Pag. 31/38
--	--	---

Sodio (natriemia)	90.40.4_2 221	ISE indiretto/ Cobas Roche CV%: 2	Plasma, verde chiaro, litio eparina routine, verde scuro litio eparina urgenze Consegna entro 4 ore dal prelievo	1		
Sodio POCT	90.40.4_2 221p	ONPG e beta galattosidasi/ Piccolo De Mori	Plasma, verde scuro, litio eparina urgenze			
Sodio urinario (Sodiuria, natriuria)	90.40.4_4 406	ISE indiretto/ Cobas Roche CV%: 4	Urina 24 ore, contenitore senza conservati. Acquisibile presso farmacie. Campione mantenuto possibilmente in luogo fresco durante la raccolta.	1		
Somatomedina C (Igf-1)	90.40.7_2 new7303		Siero, marrone	14	Mestre	Sierare e aliquotare conservare a 2-8 °C.
Somatostatina	90.35.6_0 new7347		Plasma, lilla K2EDTA	37	Padova	Sierare e conservare a -20°C
Striscio periferico (Esame microscopico del sangue periferico). Nota al prescrittore esterno (MMG e PLS): Specificare nell' impegnativa con emocromo la richiesta dello striscio.	1100	Microscopia robotizzata con colorazione May Grunwald Giemsa	Sangue intero, lilla, K2 EDTA.	2		
Tacrolimus (FK 506)	90.17.B_26 new1245		Sangue intero, lilla K2 EDTA	5	Padova	Conservare 7 giorni a 2-8°C tal quale. Per tempi più lunghi conservare a -20°C.
TAS (ASLO, Anticorpi anti streptolisina O)	91.08.5_0 505	Immunoturbidimetria/ Cobas 702 Roche CV%: 2.1	Plasma, verde chiaro, litio eparina	1		
Teicoplanina Effettuabile solo nei reparti e Centri prelievi ospedalieri per immediata processazione del campione	90.17.C_20 new1243	Immunoturbidimetria, Tema, distributore di Thermo Scientific Cobas 501 Roche, Adria. CV%: 10	Siero, Marrone	2		Sierare entro 20 minuti dal prelievo; conservare 7 giorni a 2-8 °C.
Tempo di protrombina (PT) INR	90.75.4_0 1101	Viscosimetrico/ STAR R Max 3 STAGO CV%:3	Plasma, celeste sodio citrato. Consegna entro 4 ore dal prelievo	1		
Tempo di protrombina INR POCT	90.75.4_0 1101pp	Foto ottico/ Hemocrom CREMASCOLI	Plasma, celeste sodio citrato. Consegna entro 4 ore dal prelievo			
Tempo di protrombina INR POCT- MGI	90.75.4_0 1101pp	Fluorescenza in microfluidica. Platform/ LumiraDX. Biomedical Service	Sangue capillare			
Tempo di tromboplastina parziale attivata (aPTT)	90.76.1_0 1103	Viscosimetrico/ STAR R Max 3 STAGO CV%: 3	Plasma, celeste sodio citrato. Consegna entro 4 ore dal prelievo	1		
Tempo di tromboplastina parziale attivata (aPTT) POCT	90.76.1_0 1103pp	Foto ottico / Hemocrom CREMASCOLI	Plasma, celeste, sodio citrato. Consegna entro 4 ore dal prelievo			
Teofillina	90.17.C_33		Siero, giallo	11	Mestre	Sierare e conservare

 REGIONE DEL VENETO ULSS5 POLESANA UOC Medicina di Laboratorio	CATALOGO PRESTAZIONI UOC MEDICINA DI LABORATORIO (CPL)	DV/MLAB/09 Rev. 7 Pag. 32/38
--	--	---

	new1225					a 2-8 °C.
Test di gravidanza	90.27.3_1 new649	Immunocromatografico su card: ricerca HCG	Urina estemporanea, vasetto sterile. Acquisibile presso farmacie.	1		
Test di gravidanza POCT	90.27.3_0 649p	Immunocromatografico su card: ricerca HCG	Urina estemporanea, vasetto sterile			
Testosterone libero	90.41.4_0 7031		Siero, blu	17	Padova	Sierare e conservare a -20°C
Testosterone totale	90.41.3_0 731	ECLIA Elettrochemiluminescenza. Cobas 601 Roche. Trecenta CV%: 12	Siero, blu	3		Sierare e conservare 7 giorni a 2-8 °C. Per tempi più lunghi Sierare e conservare a -20 °C.
Tireoglobulina (TG)	90.41.5_0 7013	ECLIA Elettrochemiluminescenza. Cobas 601 Roche. Adria. CV%: 10	Siero, marrone.	8		Sierare e conservare 3 giorni a 2-8 °C. Per tempi più lunghi Sierare e conservare a -20 °C.
Tireoglobulina su aspirato Richiedibile solo da UO previo accordo	7013asp	ECLIA Elettrochemiluminescenza. Cobas 601 Roche. Adria.	Siero, Marrone			
Topiramato LEA solo per residenti Regione Veneto. Per Utenti extra Veneto accettare come Privati Paganti.	90.17.C_7 new1247		Siero, blu elettrico	8	Padova	Conservare 3 giorni a 2-8 °C. Per tempi più lunghi sierare e conservare a -20 °C.
Transferrina	90.42.5_2 247	Turbidimetrico/ Cobas 502 Roche CV%: 2.6	Plasma, verde chiaro litio eparina	1		
Transferrina Desialata, Carboidrato Carente (CDT)	90.42.6_0 new7355		Siero, blu.	15	Padova	Sierare e conservare a -20° C. Se campione eccessivamente emolizzato o itterico richiamare l'utente.
Transferrina Indice di saturazione (Saturazione della transferrina): Nota: il codice regionale SATTRANSF comprende ferro 90.22.5_2 , e transferrina 90.42.5_2	SATTRANSF 240	Vedi singoli test. Calcolo	Plasma, verde chiaro litio eparina	1		
Trigliceridi	90.43.2_0 253	Glicerol-chinasi-POD/ Cobas Roche CV%: 1.9	Plasma, verde chiaro, litio eparina	1		
Triptasi	90.42.B_2 new7035		Siero, blu	4	Padova	
Troponina T hs Richiedibile solo in urgenza da UO e PS	90.82.3_0 283	ECLIA Elettrochemiluminescenza. Cobas Roche CV%: 10 al cutoff	Plasma, verde scuro litio eparina urgenze.			
Troponina T POCT. Ad Adria il test è eseguito H24	90.82.3_0 283pp	Immunofluorescenza/ AQT 90 De Mori	Plasma, lilla/K2 EDTA			
TSHR, (Anticorpi anti recettore TSH, TRAb, TSI)	90.53.5_0 7353		Siero, marrone	10	Mestre	Sierare e conservare a 2-8 °C.
TSH Reflex Se TSH ≥ 0.45 mU/L e ≤ 3.5 mU/L: referto del solo TSH senza ulteriori indagini; Se TSH < 0.45 mU/L o > 3.5 mU/L:	90.41.8_0 new705ref	ECLIA Elettrochemiluminescenza. Cobas Roche. CV%: 4.2	Plasma, verde chiaro litio eparina	2		

REGIONE DEL VENETO  ULSS5 POLESANA UOC Medicina di Laboratorio	CATALOGO PRESTAZIONI UOC MEDICINA DI LABORATORIO (CPL)	DV/MLAB/09 Rev. 7 Pag. 33/38
---	--	---

esecuzione automatica di FT4; Se TSH < 0.45 mU/L e FT4 ≥ limite superiore di riferimento, referto di TSH + FT4; Se TSH < 0.45 mU/L e FT4 < limite superiore dell'intervallo di riferimento, esecuzione automatica di FT3 e referto di TSH + FT4 + FT3. Se TSH > 3.5 mU/L: esecuzione automatica di FT4 e referto di TSH + FT4. Non associabile ai singoli codici 90.43.3_0 (FT3), 90.42.3_0 (FT4).					
Urato (Acido urico, Uricemia).	90.43.5_2 251	Uricasi e perox/ Cobas 702 Roche CV%: 1.3	Plasma, verde chiaro litio eparina	1	
Urato urine (Uricuria, Acido urico urinario).	90.43.5_4 430	uricasi e perox/ Cobas Roche CV%: 1.8	Urina 24 ore, contenitore senza conservanti acquisibile presso farmacie. Mantenere campione in luogo fresco durante la raccolta	1	
Urea (Azotemia)	90.44.1_6 new205	enzimatico/ Cobas 702 Roche CV%: 1.1	Plasma, verde chiaro, litio eparina. Plasma, verde scuro litio eparina urgente	1	
Urea urine (Azoturia)	90.44.1_3 434	Enzimatico/ Cobas 702 Roche CV%: 2.2	Urina 24 ore contenitore senza conservati. Acquisibile in farmacia. Mantenere campione in luogo fresco durante la raccolta	1	
Urea (Azotemia) POCT	90.44.1_6 205p	Ureasi, GLDH/ Piccolo De Mori	Plasma, verde scuro litio eparina urgente		
Urine esame completo	90.44.3_0 1501	Riflettanza, esame microscopico del sedimento a lettura automatizzata	Urina estemporanea, vasetto sterile con dispositivo per successiva aspirazione. In caso di richiesta di esame urine+ urinocoltura è sufficiente questo stesso unico vasetto. Acquisibile in farmacia. Consegna entro 4 ore dal prelievo. In urgenza non è effettuato l'esame microscopico del sedimento. Esame chimico: UOSD Microbiologia. Visione sedimento UOC Medicina di Laboratorio	1	
Urine POCT	90.44.3_0 1320	Riflettanza	Urina estemporanea, vasetto sterile con dispositivo per		

 REGIONE DEL VENETO ULSS5 POLESANA UOC Medicina di Laboratorio	CATALOGO PRESTAZIONI UOC MEDICINA DI LABORATORIO (CPL)	DV/MLAB/09 Rev. 7 Pag. 34/38
---	---	---

			successiva aspirazione.			
Vancomicina	90.17.C_4 new1241	Immunoturbidimetrico, Cobas 501 Roche, Adria	Plasma, lilla K2/EDTA.	1		Sierare e conservare 14 giorni a 2-8 °C.
VES (Velocità di eritrosedimentazione)	90.82.5_0 1013	Fotometria capillare quantitativa/Test 1, Alifax	Sangue intero, nera K2EDTA	1		
VIP (Polipeptide intestinale vasoattivo) Prelievo eseguito solo presso Centri Prelevi Ospedalieri e UO per necessità di immediato trattamento del campione.	90.36.5_2 7317		Plasma, lilla K2 EDTA.	37	Padova	Sierare e conservare a - 20°C
Vitamina B12 attiva (Cobalamina)	90.13.5_3 new711	ECLIA Elettrochemiluminescenza. Cobas 602 Roche. CV%: 10	Plasma, verde chiaro litio eparina	2		
Vitamina D (25-idrossicolecalciferolo, 25-idrossivitamina D)	90.44.6_2 new7331	ECLIA Elettrochemiluminescenza. Cobas 801 Roche.	Plasma. verde	2		
Vitamina E	90.45.2_3 7329		Siero, blu elettrico	15	Padova	Sierare e conservare a -20°C
Zinco	90.45.4_2 235		Siero, giallo	14	Mestre	Sierare e conservare 5 giorni a 2-8 °C.

Specifiche terminologiche e operative della colonna "Indicazioni per operatori Centri Prelevi e Fase Preanalitica": tutti i campioni con matrice plasma e siero vanno centrifugati. Per "sierare" si intende la centrifugazione e separazione del siero/plasma dalla parte corpuscolata ponendolo in altra provetta. Per "conservare" (senza sierare) si intende la centrifugazione e conservazione della provetta tal quale. Nei campioni urinari "conservare" è inteso come urina tal quale, accertandosi che la quantità in mL di urina 24 ore sia presente nel LIS. Il tempo di conservazione (ore/giorni) va inteso come tempo massimo.

Allergeni richiedibili singolarmente:

NB: il codice Insiel corrisponde al codice internazionale (es. f76 corrisponde a alfa-lattoalbumina).

Per modalità di prelievo/esecuzione/tempi di risposta vedi sopra IgE specifiche. Gli allergeni in **grassetto** sono eseguiti presso AO Padova

ACARI

☐ d70 acarus	☐ d202 nDer p 1 House dust mite (Dermatophagoides Pteron.)
☐ d1 dermatophagoides pt.	☐ d203 rDer p 2 House dust mite (Dermatophagoides Pteron.)
☐ d2 dermatophagoides far.	☐ d205 rDer p 10 Tropomyosin, House dust mite (Dermatoph. P.)
	☐ d73 Glycyphagus domesticus (Storage mite)
	☐ d71 Lepidoglyphus destructor (Storage mite)

ALBERI

☐ t1 Acero	☐ t225 rBet v 6 Birch (Betula verrucosa)
☐ t3 Betulla	☐ t226 nCup a 1 Cypress (Cupressus arizonica)
☐ t215 Bet v1	☐ t224 rOle e 1 Olive (Olea europaea)
☐ t216 Bet v2	☐ t227 nOle e 7 Olive (Olea europaea)
☐ t220 Bet v4	☐ t241 rPla a 1Maple leaf sycamore, London plane (Plat. Acerifolia)
☐ t23 Cipresso mediterraneo	☐ t19 Acacia longifolia
☐ t5 Faggio americano	☐ t209 Carpino bianco (Carpinus betulus)
☐ t4 Nocciolo	☐ t17 Cryptomeria japonica
☐ t9 Olivo	☐ t15 Frassino (Fraxinus americana)
☐ t2 Ontano bianco	☐ t210 Ligustro (Ligustrum vulgare)
☐ t11 Platano	☐ t8 Olmo americano (Ulmus americana)
☐ t14 Pioppo	☐ t16 Pino strobo (Pinus strobus)
☐ t12 Salice	☐ t7 Quercia bianca (Quercus alba)
	☐ t208 Tiglio (Tilia cordata)

ALIMENTI

☐ f47 Aglio	☐ f430 rAct d 8 PR-10, Kiwi (Actinidia deliciosa)
☐ f237 Albicocca	☐ f443 rAna o 3, Cashew nut (Anacardium occidentale)
☐ f1 Albume	☐ f352 rAra h 8 PR-10, Peanut (Arachis hypogaea)
☐ f202 Anacardio	☐ f426 rGad c 1 Cod (Gadus morhua)
☐ f352 Ara h8	☐ f232 nGal d 2 Ovalbumin, Egg (Gallus spp.)

REGIONE DEL VENETO ULSS5 POLESANA UOC Medicina di Laboratorio	CATALOGO PRESTAZIONI UOC MEDICINA DI LABORATORIO (CPL)	DV/MLAB/09 Rev. 7 Pag. 35/38
--	--	---

f422 Ara h 1 f423 Ara h2 f 424 Ara h3 f427 Ara h9 f13 Arachidi f33 Arancia f80 Astice f7 Avena f96 Avocado f92 Banana f76 Bos d4 alfa lattoalbumina f77 Bos d5 beta lattoglobulina f78 Bos d8 caseina f93 Cacao f27 Carne di bue f213 Carne di coniglio f26 Carne di maiale f83 Carne di pollo f31 Carota f299 Castagna f48 Cipolla f428 Cor a1 f425 Cor a8 f440 Cor a9 f439 Cor a14 Hazel nut f15 Fagioli bianchi f44 Fragola f233 Gal d1Ovomucoide k208 Gal d4 Lisozima uovo f24 Gambero f98 Gliadina f79 Glutine f23 Granchio comune f4 Grano f8 Granoturco f84 Kiwi f2 Latte f45 Lievito f20 Mandorla f49 Mela f87 Melone f3 Merluzzo (pesce) f37 Mitili f17 Nocciola f256 Noce f6 Orzo f35 Patata f94 Pera f95 Pesca f253 Pinoli f12 Piselli f203 Pistacchio f254 Platessa f59 Polpo f86 Prezzemolo f25 Pomodoro f419 Pru p1 f420 Pru p3 f421 Pru p4 f9 Riso integrale f85 Sedano f5 Segale f10 Semi di sesamo f14 Semi di soia f58 Seppia f206 Sgombro (Scomber scombrus) f337 Sogliola f40 Tonno	f353 rGly m 4 PR-10, Soy (Glycine max)) f431 nGly m 5 beta-conglycinin, Soy (Glycine max) f432 nGly m 6 Glycinin (Glycine max) f441 rJug r 1 Walnut (Juglans regia) f442 rJug r 3 LTP, Walnut (Juglans regia) f416 rTri a 19 Omega-5 Gliadin, Wheat (Triticum spp.) f434 rMal d 1 PR-10, Apple (Malus domestica) f435 rMal d 3 LTP, Apple (Malus domestica) f433 rTri a 14 LTP, Wheat (Triticum aestivum) f313 Acciuga (Engraulis encrasicolus) f278 Alloro (Laurus nobilis) f329 Anguria (Citrullus lanatus) f261 Asparago (Asparagus officinalis) f304 Aragosta (Palinurus spp.)/Aragosta f269 Basilico (Ocimum basilicum) f260 Broccoli (Brassica oleracea var. italica) f221 Caffè (Coffea spp.) f258 Calamaro (Loligo spp.) f338 Capesante (Pecten spp.) f284 Carne di tacchino (Meleagris gallopavo) f296 Carruba f216 Cavolo (Brassica oleracea var. capitata) f265 Cumino (Carum carvi) f287 Fagioli rossi (Phaseolus vulgaris) f276 Finocchio fresco (Foeniculum vulgare) f81 Formaggio a pasta dura f82 Formaggio a pasta molle f309 Ceci (Cicer arietinus) f244 Cetriolo (Cucumis sativus) f268 Chiodi di garofano (Syzygium aromaticum) f242 Ciliegia (Prunus avium) f328 Fico (Ficus carica) f294 Frutto della passione (Passiflora edulis) f212 Funghi, champignon (Agaricus hortensis) f297 Gomma arabica f246 Gomma di Guar (Cyamopsis tetragonolobus) f11 Grano saraceno (Fagopyrum esculentum) f231 Latte bollito f300 Latte di capra f215 Lattuga (Lactuca sativa) f235 Lenticchia (Lens esculenta) f208 Limone (Citrus limon) f314 Lumaca (Helix aspersa)) f262 Melanzana (Solanum melongena) f332 Menta (Mentha piperita) f55 Miglio comune (Panicum milliaceum) f288 Mirtillo nero (Vaccinium myrtillis) f211 Mora (Rubus fruticosus) f18 Noce brasiliana (Bertholletia excelsa) f36 Noce di cocco (Cocos nucifera) f342 Oliva (Olea europaea) f283 Origano (Origanum vulgare) f293 Papaya (Carica papaya) f218 Paprica, Peperone (Capsicum annum) f90 Malto f91 Mango (Mangifera indica) f279 Pepe di Cayenna (Capsicum frutescens) f280 Pepe nero (Piper nigrum) f263 Pepe verde (Piper nigrum) f209 Pompelmo (Citrus paradisi) f255 Prugna (Prunus domestica) f61 Sardina (Sardinops melanosticta) f224 Semi di papavero (Papaver somniferum) f89 Senape (Brassica/Sinapis spp.)
--	--

 REGIONE DEL VENETO ULSS5 POLESANA UOC Medicina di Laboratorio	CATALOGO PRESTAZIONI UOC MEDICINA DI LABORATORIO (CPL)	DV/MLAB/09 Rev. 7 Pag. 36/38
--	--	---

☐ f204 Trota ☐ f351 Tropomiosina Pen a1 ☐ f75 Tuorlo ☐ f245 Uovo ☐ f207 Vongola	☐ f214 Spinaci (Spinachia oleracea) ☐ f259 Uva (Vitis vinifera) ☐ f340 Rosso cocciniglia (Dactylopius coccus) ☐ f41 Salmone (Salmo salar) ☐ f270 Zenzero (Zingiber officinale) ☐ f225 Zucca (Cucurbita pepo)
--	---

DERIVATI EPIDERMICI E PROTEINE ANIMALI

☐ e5 Forfora di cane ☐ e3 Forfora di cavallo ☐ e1 Forfora di gatto ☐ e85 Piume di gallina ☐ e204 nBos d6 BSA Cow (Bos spp.) ☐ e101 rCan f 1 Dog (Canis familiaris) ☐ e102 rCan f 2 Dog (Canis familiaris) ☐ e94 rFel d 1 Cat (Felis domesticus) ☐ e220 nFel d 2 Cat serum albumin (Felis domesticus) ☐ e80 Eptelio di capra ☐ e6 Eptelio di cavia ☐ e84 Eptelio di hamster (criceto) ☐ e83 Eptelio di maiale ☐ e81 Eptelio di pecora ☐ e73 Eptelio di ratto ☐ e71 Eptelio di topo	☐ e4 Forfora di vacca ☐ e70 Piume d'oca ☐ e86 Piume di anatra ☐ e89 Piume di tacchino ☐ e75 Proteine seriche di ratto ☐ e76 Proteine seriche di topo ☐ e87 Proteine seriche e urinarie di ratto ☐ e74 Proteine urinarie di ratto ☐ e72 Proteine urinarie di topo
--	---

ERBE

☐ w1 Ambrosia (Ambrosia elatior) ☐ w5 Assenzio maggiore ☐ w6 Assenzio selvatico ☐ w10 Farinaccio ☐ w9 Lanciuola ☐ w7 Margherita dei prati ☐ w19 Parietaria off. ☐ w21 Parietaria jud. ☐ w211 Par j2	☐ w230 nAmb a 1 Ragweed (Ambrosia elatior) ☐ w231 nArt v 1 Mugwort (Artemisia vulgaris) ☐ w233 nArt v 3 LTP, Mugwort (Artemisia vulgaris) ☐ w234 rPla l 1 Plantain (Plantago lanceolata) ☐ w18 Acetosa minore (Rumex acetosella) ☐ w3 Ambrosia trifida ☐ w15 Atriplex lentiformis ☐ w16 Ciliatalva ☐ w204 Girasole (Helianthus annuus) ☐ w17 Granata (Kochia scoparia) ☐ w20 Ortica comune (Urtica dioica) ☐ w8 Taraxacum vulgare ☐ w12 Verga d'oro (Solidago virgaurea)
--	--

FARMACI

☐ c6 Amoxicillina ☐ c1 Penicilloyl G ☐ c2 Penicilloyl V	☐ c202 Succinilcolina (Suxamethonium (succinylcholine) ☐ c5 Ampicillina ☐ c7 Cefaclor
--	--

MISCELLANEA

☐ Ro214 MUXF3 CCD bromelina	
--	--

MUFFE

☐ m6 Alternaria alternata ☐ m3 Aspergillus fumigatus ☐ m5 Candida albicans ☐ m2 Cladosporium herbarum ☐ m4 Mucor racemosus ☐ m1 Penicillium notatum	☐ m229 rAlt a 1 (Alternaria alternata) ☐ m218 rAsp f 1 (Aspergillus fumigatus) ☐ m219 rAsp f 2 (Aspergillus fumigatus) ☐ m220 rAsp f 3 (Aspergillus fumigatus) ☐ m221 rAsp f 4 (Aspergillus fumigatus) ☐ m222 rAsp f 6 (Aspergillus fumigatus) ☐ m207 Aspergillus niger ☐ m12 Aureobasidium pullulans ☐ m7 Botrytis cinerea ☐ m16 Curvularia lunata ☐ m80 Enterotossina A di Staffilococco ☐ m81 Enterotossina B di Staffilococco
--	--

 REGIONE DEL VENETO ULSS5 POLESANA UOC Medicina di Laboratorio	CATALOGO PRESTAZIONI UOC MEDICINA DI LABORATORIO (CPL)	DV/MLAB/09 Rev. 7 Pag. 37/38
---	--	---

	☐ m223 Enterotossina C di <i>Staphylococcus</i> ☐ m226 Enterotossina TSST di <i>Staphylococcus</i> ☐ m9 <i>Fusarium proliferatum</i> (F. moniliforme) ☐ m227 <i>Malassezia</i> spp. ☐ m13 <i>Phoma betae</i> ☐ m11 <i>Rhizopus nigricans</i> ☐ m8 <i>Setomelanomma rostrata</i> (<i>Helminthosporium halodes</i>) ☐ m10 <i>Stemphylium herbarum</i> (S. botryosum) ☐ m201 <i>Tilletia tritici</i> ☐ m211 <i>Trichophyton mentagrophytes</i> var. interdigitale
--	---

POLLINI DI GRAMINACEE

☐ g13 Bambagiona ☐ g6 Coda di topo ☐ g2 Erba canina ☐ g3 Erba mazzolina ☐ g15 Grano ☐ g202 Granoturco ☐ g8 Gramigna dei prati ☐ g5 Logliarello ☐ g1 Paleino odoroso ☐ g4 Paleo dei prati	☐ g205 rPhl p1 Timothy (<i>Phleum pratense</i>) ☐ g206 rPhl p2 Timothy (<i>Phleum pratense</i>) ☐ g208 nPhl p4 Timothy (<i>Phleum pratense</i>) ☐ g210 Phl p7 ☐ g212 Phl p12 ☐ g215 rPhl p5b Timothy (<i>Phleum pratense</i>) ☐ g216 nCyn d 1 Bermuda grass (<i>Cynodon dactylon</i>) ☐ g209 rPhl p 6 Timothy (<i>Phleum pratense</i>) ☐ g211 rPhl p 11 Timothy (<i>Phleum pratense</i>) ☐ g10 Cannarecchia (<i>Sorghum halepense</i>)
---	---

POLVERI di casa

☐ h1 Polvere da Greer Labs.Inc	☐ h2 Polvere da Hollister-Stiers Labs
---	--

PROFESSIONALI

☐ k82 Lattice ☐ k215 rHev b 1 Latex (<i>Hevea brasiliensis</i>) ☐ k217 rHev b 3 Latex (<i>Hevea brasiliensis</i>) ☐ k218 rHev b 5 Latex (<i>Hevea brasiliensis</i>) ☐ k220 rHev b 6.02 Latex (<i>Hevea brasiliensis</i>) ☐ k221 rHev b 8 Profilin, Latex (<i>Hevea brasiliensis</i>) ☐ k224 rHev b 11 Latex (<i>Hevea brasiliensis</i>) ☐ k87 nAsp o 21 alpha-amylase (<i>Aspergillus oryzae</i>)	☐ k79 Anidride ftalica ☐ k81 <i>Ficus benjamina</i> (<i>Ficus</i> spp.) ☐ k80 Formalina Formaldeide ☐ k76 Isocianato MDI (Diphenylmethane diisocyanate) ☐ k75 Isocianato TDI (Toluene diisocyanate) ☐ k78 Ossido di etilene ☐ k71 Semi di ricino
--	--

VELENO D'INSETTI

☐ i1 Ape ☐ i2 Calabrone bianco ☐ i75 Calabrone europeo ☐ i3 Giallone ☐ i4 Vespa ☐ i77 Vespa europea ☐ i208 rApi m 1 Phospholipase A2, Honey bee (<i>Apis mellifera</i>) ☐ i217 rApi m10, Honey bee (<i>Apis mellifera</i>) ☐ i211 rVes v 1 Phospholipase A1, Common wasp (<i>Vespula vulg.</i>) ☐ i209 rVes v 5 Common wasp (<i>Vespula vulgaris</i>) ☐ i210 rPol d 5 Paper wasp (<i>Polistes dominulus</i>) ☐ i8 Baco da seta (<i>Bombyx mori</i>) ☐ i205 Bombo (<i>Bombus terrestris</i>)	☐ i5 Calabrone giallo (<i>Dolichovespula arenaria</i>) ☐ i70 Formica (<i>Solenopsis invicta</i>) ☐ i73 Larve rosse di zanzara (<i>Chironomus thummi</i>) ☐ i6 Scarafaggio (<i>Blatella germanica</i>) ☐ i204 Tafano (<i>Tabanus</i> spp.) ☐ i71 Zanzara comune (<i>Aedes communis</i>)
--	--

Totale prestazioni CPL 705

Totale prestazioni escluso le 331 IgE Specifiche per allergeni: 372

Esami in service esclusi allergeni: 109

Esami in service con allergeni: 306